



NYLON

Descrição - Os fios cirúrgicos de Nylon são de origem sintética, fabricados a partir da extrusão de poliamida 6 (PA 6.6). É um material biologicamente compatível, bem tolerado pelo organismo, monofilamentar, de alta resistência e fácil manuseio. A hidrólise progressiva pode resultar em perda gradual da força tênsil “in vivo”. Reação tecidual inflamatória aguda mínima. Não absorvível. Esterilizado por Óxido de Etileno ou Cobalto.

Indicações - Aproximação e/ou ligadura de tecidos em geral, incluindo uso em procedimentos ginecológicos, obstétricos, oftalmológicos, vasculares e cuticulares.

Contraindicações - São contraindicados em procedimentos onde houver contato prolongado com soluções salinas.

Apresentações - Apresenta-se na coloração preta ou incolor, com os números cirúrgicos de 10-0 a 2 (vide tabela de preços), providos ou não de agulhas.

Instruções de Uso - Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

Cuidados - Este produto deve ser utilizado por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas. Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material. Usar técnicas assépticas. Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada. Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único. O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina. Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada. Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida. O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico. PROIBIDO REPROCESSAR. A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado.

Conservação - Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

Validade - A sutura de Nylon tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.

CAIXA COM 12, 24 E/OU 36 ENVELOPES - PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO RE-ESTERILIZAR - ESTÉRIL - DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: COBALTO OU ETO.

SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.

FÁBRICA - AV. HERMÓGENES. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA CEP 76100-000 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – GO.

Farmacêutica Responsável: DR^a KÁTIA REGINA DO NASCIMENTO DIAS POLICARPO CRF-GO 11.307

VENDAS - AV. C-255 Nº 270, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SEBBA, SALAS: 602/603 NOVA SUIÇA - GOIÂNIA – GO - CEP: 74280-010. SAC.: (62)3259-4546. E-MAIL: vendas@sutura.com.br.

CNPJ: 33.348.467/0001-86 – Indústria Brasileira

Registro no Ministério da Saúde Nº 10243410009 (Agulhado), Nº 10243410021 (Sertix) e Nº 10243410041 (Não Agulhado)