

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL

Modelo comercial: avental cirúrgico com ou sem reforço, com punho de malha.

Indicação de uso: Indicado para procedimentos cirúrgicos, laboratoriais e exames. Apresentam a finalidade de proteger o usuário de uma possível contaminação em procedimentos cirúrgicos. Combinam conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e a tração.

Instrução de uso: Verificar se a embalagem não foi violada, em caso positivo descartar o produto; retirar o avental de sua embalagem e utilizar, de acordo com os procedimentos padronizados do hospital; adaptar ao corpo de modo confortável, cobrindo totalmente a roupa e fixa-lo; executar o procedimento; retirar o avental, descartando imediatamente em local apropriado; por ser um produto de uso único, o mesmo deverá ser destruído após o uso.

Validade: 5 anos

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. Esterilizado por óxido de etileno. Produto de uso único. Proibido reprocessar.

Anvisa nº: 8003400003

Produto esterilizado por óxido de etileno

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br