

Produto: Medix Brasil - Máscara de Proteção Descartável com Elástico KN95

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: não possui.

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>Máscara de Proteção Descartável com Elástico KN95 Medix Brasil, com fechamento em elástico, não estéril, feita em polipropileno não tecido e filtro meltblow. Uso único, ecologicamente sustentável, biodegradável, respirável e macio, sem látex e fibra de vidro, possui clipe de nariz ajustável.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>As Máscaras de Proteção Descartável com Elástico KN95 Medix Brasil, são destinadas a proteção do usuário, contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral ou outras áreas, utilizada para o conforto e higiene das vias respiratórias em trabalhos que requeiram barreiras filtrantes, de uso único, sendo proibido reprocessar e necessário descartar após o uso.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada em 100% polipropileno (não tecido) e papel filtro melt blown BFE: ≥95%. ✓ Possui 04 camadas: <ul style="list-style-type: none"> <u>1ª Camada</u>: polipropileno não tecido de 55gr±2gr <u>2ª Camada</u>: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) de 25gr±2gr <u>3ª Camada</u>: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) de 25gr±2gr <u>4ª Camada</u>: polipropileno não tecido de 50gr±2gr ✓ Soldada eletronicamente por ultrassom ✓ Contém clipe nasal ajustável de arame ✓ Cor: branca ✓ Disponível nos modelos: com elástico ✓ Validade 3 anos ✓ Descartável e de uso único
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 10 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 60 cartuchos.</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segure a máscara verticalmente com o clipe nasal para cima. 2. Coloque a máscara firmemente no rosto com o clipe nasal na ponte do nariz. 3. Pendure o elástico nas orelhas e ajuste-o de acordo com o seu rosto. 4. Ajuste o clipe nasal de acordo com o seu rosto. 5. Faça o teste para verificar se a máscara está bem ajustada conforme as etapas a seguir: coloque as mãos sobre a máscara para confirmar se ela está na posição correta. Se houver fluxo de ar ao redor, aperte o clipe nasal para ajustá-lo melhor no nariz. Se o ar vazar pelas bordas, ajuste o elástico para que se encaixe melhor, podendo fazer um nó.

<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”</i></p> <p>Não indicada para proteção contra partículas oleosas em suspensão. Não indicada para proteção contra poeiras, névoas e partículas não tóxicas. Não indicada para proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas. Não indicada para proteção contra partículas tóxicas finíssimas e radionucleotídeos.</p> <p>Lave as mãos antes de usar a máscara ou evite tocar em sua parte interna para reduzir a possibilidade de contaminação.</p> <p>Distinguir o interior, o exterior, a parte superior e a parte inferior da máscara; o lado onde está impresso Medix é o lado exterior da máscara; o clipe nasal de metal deve estar na parte superior da máscara.</p> <p>Certifique-se de que a máscara está o mais próximo possível do seu rosto. Quando for constatado que a máscara está contaminada, danificada ou com resistência alterada, a mesma deve ser descartada e substituída.</p> <p>O fabricante indica não ultrapassar 3 horas de uso, quando uso contínuo.</p> <p>Ler atentamente as Instruções de Uso;</p> <p>Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;</p>
<p>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</p>	<p>As Máscaras de Proteção Descartável com Elástico KN95 Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

