

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000 Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

FINALIDADE:

Utilizada com a finalidade de alimentação por curto prazo, quando por alguma razão o paciente não pode utilizar a boca no processo digestivo, sendo as sondas curtas aquelas que são introduzidas até ao o estômago e as sondas longas são aquelas que são introduzidas até o trato intestinal. As sondas são conectadas a um equipo de nutrição, que por sua vez é conectado ao Frasco de alimentação ou a uma seringa.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.

A Sonda Gástrica é embalada individualmente em um pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e, do outro, filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr 17iosani17ico17m e esterilizado por oxido de etileno.

Comercializada nas seguintes apresentações:

	2 Orifícios			4 Orifícios							
Naso Curta	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	
Naso Longa	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24

Curta: 40 cm

Longa: 1 metro

MODO DE USO.

- O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com o domínio da técnica.
- Retirar o produto da embalagem utilizando a técnica asséptica.
- Medir o comprimento da inserção da sonda e marcar o local com esparadrapo;
- Dobrar a extremidade da sonda antes de adaptar a seringa ou equipo;
- Conectar a sonda no equipo ou seringa e por ela introduzir o alimento vagarosamente, evitando que se esvazie, para evitar a entrada de ar;
- Após a dieta, lavar a sonda com 20 ml de água. A fim de remover as partículas que nela ficarem aderidas.
- Fechar a sonda;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO.

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Este produto destina se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados na técnica própria a ser utilizada;
- Deve assegurar a compatibilidade de uso com a seringa e o equipo;
- A conexão entre o componente do tubo de PVC e luer deve suportar as condições normais de uso do produto;
- O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe de contato com o solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem;
- A embalagem deve ser perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada ou úmida.
- Deve estar impresso o número do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade;
- Produto de uso estéril e 17iosani17ico. Deve ser descartado após o uso.
- O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Registro Anvisa/MS N°
8.02860.0.0034

- MEDIO RISCO

Responsável Técnico:
SONIVAN FELIX DE ABREU
CRQ: IX 09.301988 -PR

FABRICADO POR:
Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.

Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin.
CEP 84.990-000 – Arapoti – PR
Email: sac@biosani.net.br
Telefone: (0xx43) 3557 – 4814
CNPJ: 06.143.681/0001-23

Esterilizado por oxido de etileno

Lote:
Fabricação:
Validade: