

Cadastro / Registro M.S.:

10369460184

Modelos Cadastrados:

DT-01A / DT- 01B / DT-01D / DT-01E / DT-01G / DT-11A / DT-11B / DT-11D / DT-11E / DT-02 / DT-12 / DT-101A / DT-111A / DT-101B / DT-111B / DT-K01A / DT-K11A / DT-K101A / DT-K111A

Indicação de Uso:

O Termômetro Digital SOLIDOR® é destinado a medir a temperatura do corpo humano em situações patológicas, por um período de tempo. Através de medições constantes ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico etc.).

Instrução de Uso:

1. Antes de utilizar o produto, desinfete-o.
 2. Para ligar, pressione o botão ON/OFF próximo ao display.
Um bipe curto irá soar, indicando que o termômetro está operacional. Ao mesmo tempo o termômetro executará um autoteste de rotina, durante o qual os segmentos digitais são exibidos no LCD. Quando as letras "Lo" e "C" piscarem, o termômetro está pronto para o uso.
 3. Durante a leitura, a temperatura atual é exibida continuamente e o símbolo "°C" pisca.
A medição estará completa quando um valor de temperatura constante for obtido.
O valor de temperatura é considerado constante quando a temperatura aumenta menos de 0.1 °C dentro de 16 segundos.
 4. Assim que o valor da temperatura constante for alcançado, um bipe soará quatro vezes e o símbolo "°C" parará de piscar.
A temperatura mais elevada é medida e será exibida no LCD. Entretanto, observe que este termômetro é um termômetro de máximo, ou seja, a temperatura exibida pode aumentar um pouco caso a medição continue após o bipe. Este é o caso específico de medições nas axilas, onde o valor de temperatura a ser registrado fica mais próximo da temperatura do núcleo do corpo. Neste caso, observe a descrição sob "Métodos de medição de temperatura".
 5. Quando a medição estiver completa, desligar o termômetro pressionando o botão ON/OFF.
 6. Após a exibição da temperatura, o termômetro desligará automaticamente após 10 minutos.
- Nota:** Caso a temperatura ambiente esteja abaixo de 32 °C, é exibido "L" no display LCD e caso a temperatura esteja maior que 42 °C é exibido "H" no display.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- A melhor maneira para limpar a ponta do termômetro é através da aplicação de desinfetante (por exemplo, 70% de álcool etílico) com um pano úmido.
- Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta umidade ou poeira. O produto pode ter seu desempenho diminuído.
- O produto deve ser manuseado cuidadosamente, evitando quedas, e ser armazenado em local adequado.

Advertência/Precaução:

- Limpe o sensor do termômetro antes de armazená-lo.
- Limpe o sensor do termômetro, pelo menos 15 minutos, antes de qualquer medição.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Os produtos contêm partes pequenas que podem ser engolidas.
- Caso a temperatura ambiente esteja acima de 35 °C mergulhe a ponta do termômetro em água fria por aproximadamente 5 a 10 segundos antes de medir a temperatura.
- Pare de usar o termômetro se ele operar de maneira incorreta ou se o display apresentar mal funcionamento.
- Febre persistente, principalmente em crianças, deve ser tratada por um médico, entre em contato com seu médico!
- Não permita que o dispositivo entre em contato com água quente ou qualquer outro líquido.
- Não expor diretamente ao sol ou à temperatura elevada.
- Não exponha o produto a choques severos. O produto não é a prova de choque mecânico.
- Não abra o termômetro (exceto o compartimento da bateria).
- Não dobre ou morda o sensor.

Validade:

Indeterminado

Contraindicação:

Não se aplica

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:

Hangzhou Huan Medical & Health Instruments CO. LTD.

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso,165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525