

Produto: Medix Brasil – Extensor Multivias com Clamp.

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável.

## Ficha Técnica

<p><b>IMAGEM DO PRODUTO</b></p>	
<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>	<p>Extensor Multivias com Clamp - Medix Brasil, estéril é um duplicador de acesso, conectando duas vias de infusão ao acesso venoso.</p>
<p><b>INDICAÇÃO DE USO</b></p>	<p>Extensor Multivias com Clamp - Medix Brasil é usado principalmente em conjuntos clínicos hospitalares e outros conjuntos de infusão que suportam o uso de injeção ou infusão intravenosa humana.</p>
<p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tampa do conector fabricada em polietileno</li> <li>✓ Conector fêmea feito de policarbonato</li> <li>✓ Conector Luer macho</li> <li>✓ Tubo de conexão fabricado em PVC com 30cm</li> <li>✓ Clamp fabricado em polietileno;</li> <li>✓ Conector 2 vias fabricado em PVC</li> <li>✓ Esterilizado a óxido de Etileno</li> <li>✓ Validade 5 anos após data de esterilização</li> <li>✓ Atóxico e apirogênico</li> <li>✓ Descartável e de uso único</li> </ul>
<p><b>APRESENTAÇÃO</b></p>	<p>Embalagem Primária: acondicionado individualmente em pacote tipo blister e em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. Embalagem de Transporte: caixas de Papelão contendo 800 peças (8 caixas de papelão com 100 unidades cada) ou caixas de Papelão contendo 1000 peças (10 caixas de papelão com 100 unidades cada)</p>
<p><b>ORIENTAÇÕES DE USO</b></p>	<p>Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica; Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução; Quando houver corta fluxo verificar se o mesmo permite a regulagem do fluxo da solução entre zero e o máximo;</p>
<p><b>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</b></p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”</i>; <i>“DESTRUIR APÓS O USO”</i>; <i>“PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”</i>; <i>“PROIBIDO REPROCESSAR”</i>; <b>Ler atentamente as Instruções de Uso</b>; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Extensor Multivias com Clamp - Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

### Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 [sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

### Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

### Redes Sociais:

[www.medixbrasil.com.br](http://www.medixbrasil.com.br)

