

Produto: Medix Brasil – Seringas de Insulina Descartáveis

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>As Seringas de Insulina Medix Brasil são dispositivos de uso médico-hospitalar, para uso manual. São utilizadas para infundir soluções (Insulina e Vacinas) por via subcutânea ou intradérmica no paciente, conforme técnicas de administração orientadas pelos médicos</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>Desenvolvidas para a aspiração e aplicação de líquidos e/ou medicamentos em hospitais farmácias, clínicas e laboratórios pelas vias hipodérmicas.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricadas em Polipropileno, polímero inerte, ou seja, não reage com medicamentos; ✓ Agulha: Aço inoxidável ✓ Estéreis – ETO ✓ Lubrificadas com silicone: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo; ✓ Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado; ✓ Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo; ✓ Graduação 2 em 2 UI; ✓ Modelos: Sem agulha bico luer slip 100UI 1ml (<i>Tipo 3</i>) Com Agulha Fixa 8 x 0,30 (30G 5/16") 100UI 1ml (<i>Tipo 8</i>) Com Agulha Fixa 12,7 x 0,33 (29G)100UI 1ml (<i>Tipo 8</i>) Com Agulha Acoplada bico luer slip 13 x 0,45 (26G 1/2") 100UI 1ml (<i>Tipo 8</i>) ✓ Validade 5 anos após data de esterilização ✓ Certificação INMETRO; ✓ Atóxicas e apirogênicas; ✓ Descartáveis e de uso único.
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 32 cartuchos.</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Abra a embalagem com técnica asséptica; Retire o produto da embalagem primária; Destrave o êmbolo da seringa no sentido do canhão a fim de lubrificar a borracha de ajuste ou mobilizar o êmbolo; Retire a capa protetora da agulha conectada à seringa (se tiver) e inicie o procedimento de punção ou infusão de solução; Retraia o êmbolo e aspire lentamente o líquido para o interior da seringa, evitando bolhas; Siga as instruções de administração orientadas pelo médico; Após o uso, descartar o produto. Uso único. Não reutilizar; Evite aplicar sempre no mesmo local, faça rodízio das aplicações.</p>

<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”, “NÃO DEVEM SER REUTILIZADAS”, “PROIBIDO REPROCESSAR”, “DESTRUIR APÓS O USO”;</i> Em hipótese alguma utilize as seringas caso a embalagem tenha sido violada. Não agitar a seringa com a agulha. Ao manipular as seringas utilize técnicas e instrumentais adequados. “Ler atentamente as Instruções de Uso”; Utilizar sempre técnicas ASSÉPTICAS, no manuseio. Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.</p>
<p>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</p>	<p>As Seringas de Insulina descartáveis - Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242
SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini
CRF-PR Nº 25368
Louise Marine Wittlich Succo
CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

