

CONJUNTO CATETER URETERAL DUPLO J RABO DE PORCO BIOTEQ
INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO DE USO

O Conjunto Cateter Ureteral Duplo J Rabo de Porco Bioteq é indicado para uso em ureteroscopias e para reestabelecer o fluxo da urina através dos ureteres, ligando a pélvis renal à bexiga.

INSTRUÇÃO DE USO

Introduzir o fio guia em espiral pela ponta flexível através do citoscópio ou ureterorenoscópio. Dar especial atenção ao passar pelo ureter para evitar o risco de perfurações.

Controlar a correta posição do catéter na pélvis renal através do monitor.

Deslizar o catéter de drenagem sobre o fio guia, previamente posicionado, e empurrar com a ajuda da bainha até sua posição correta.

Ao retirar o fio guia, as pontas atraumáticas da sonda se enrolarão como fixação na pélvis renal e na bexiga.

- Cateter em forma de tubo reto com as pontas enroladas, com sutura



- Introduutor



- Fio Guia



- Pinças de fixação



COMPOSIÇÃO

O Conjunto Cateter Ureteral Duplo J Rabo de Porco Bioteq é um produto constituído por:
Cateter em TPU (poliuretano termoplástico) com opção de cobertura hidrofílica para facilitar o deslizamento.

Introdutor em PE (polietileno)

Fio guia espiral em Aço Inóx (AISI 304) com cobertura em Teflon

Fio em nylon para auxílio no processo de remoção

Pinça em PP (polipropileno)

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Abrir e retirar assepticamente o produto da embalagem em ambiente estéril.

- Somente utilizar se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade, pois assim a esterilização estará garantida.

- O Conjunto para Drenagem Ureteral só deverá ser colocado por médico ou pessoal médico especializado e familiarizado com as técnicas de colocação e com o equipamento habitualmente utilizado na implementação destes dispositivos. Não reutilizar o produto.

O reprocessamento e a reutilização podem causar risco de crescimento bacteriano, contaminação, lesão do paciente e podendo levar a morte.

Produto Estéril a óxido de etileno.

Valido por 5 anos a contar da data de fabricação.

O fabricante recomenda uso unico

CONTRAINDICAÇÕES

Cirurgia mal sucedida

Hematuria inexplicavel

Alameda África,570 - Gleba Y Polo Empresarial Tamboré

CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP

PABX: (11) 4152-0500 - Fax (11) 4152-0524 - Televendas 0800 554999

E-mail: comercial@cfernandes.com.br

Site: www.cfernandes.com.br



Extração irreparável ureteral

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEIO

Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo de poeiras

Transportar em sua embalagem original, ao abrigo de poeiras e calor excessivo

Deve ser manipulado por profissional habilitado

FABRICADO POR:

Bioteque Corporation

5F-6, NO.23. SEC.1. Chang-An.E.Road Taipei 104, Taiwan

01 nº 5, Chung Cheng Road, Su-Ao Cheng, I-Lan, Taiwan

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Ltda

Alameda África, 570 – Tambore – Santana de Parnaíba – SP

Cep 06543.306 Sac 0800.7701667

Resp Técnica: Enfa Lucia Akemi Higa

Reg MS: 10150470435

Alameda África,570 - Gleba Y Polo Empresarial Tamboré

CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP

PABX: (11) 4152-0500 - Fax (11) 4152-0524 - Televendas 0800 554999

E-mail: comercial@cfernandes.com.br

Site: www.cfernandes.com.br