

Cadastro / Registro M.S.:

10369460114

Modelos cadastrados:

19G (1,08mm) - Tubo com 9cm, 18cm ou 30cm de comprimento - cor da asa: branca; 21G (0,81mm) - Tubo com 9cm, 18cm ou 30cm de comprimento - cor da asa: verde; 23G (0,64mm) - Tubo com 9cm, 18cm ou 30cm de comprimento - cor da asa: azul; 25G (0,51mm) - Tubo com 9cm, 18cm ou 30cm de comprimento - cor da asa: laranja; 27G (0,41mm) - Tubo com 9cm, 18cm ou 30cm de comprimento - cor da asa: cinza.

Indicação de Uso:

A família de produtos escalpe descartável Labor Import é um artigo médico-hospitalar formado por uma agulha conectada a um tubo em polietileno e asas fixadoras, popularmente conhecidas como "butterfly" e capa protetora sobre a agulha.

Instrução de uso:

1. Verificar a integridade da embalagem e a data de vencimento do produto.
2. Abrir a embalagem e fixar o conector do "scalp" ao dispositivo de coleta de sangue.
3. Remover a capa da agulha cuidadosamente sem tocar a mesma.
4. Segurando as abas, introduzir a agulha na veia onde será realizada a coleta até verificar o refluxo de sangue no tubo do "scalp".
5. Realizar o procedimento para infusão ou coleta da amostra de sangue.
6. Segurar firmemente o "scalp" pelas abas e deslizar para cima o dispositivo de segurança até cobrir totalmente a agulha.

Produto estéril. Método de esterilização: Óxido de etileno.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- **Condições de armazenamento:** estocar a temperatura ambiente e local fresco.
- **Condições de transporte:** estocar a temperatura ambiente e local fresco.
- **Condições de manipulação:** manipular a temperatura ambiente de acordo com as instruções de uso do produto e apenas para a finalidade à qual se destina.

Advertência/Precaução:

- **Advertência:** Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou violada, pois nestes casos a esterilidade está comprometida.
- **Precauções:** Descartar em recipiente apropriados para materiais perfuro-cortantes potencialmente contaminados.

Validade:

3 anos.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado/Distribuído:

Importador:

Matriz: Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.

Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.

N ° 39 South Shengli Road –

Jinxian County

Jiangxi Province

República Popular da China