

**SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO WELL LEAD
INSTRUÇÕES DE USO**

INDICAÇÃO DE USO

A Sonda Endotraqueal Sem Balão Well Lead é usada em anestesia em geral, cuidados intensivos e atendimentos de emergência para gerenciamento das vias aéreas e ventilação mecânica.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Selecionar o tamanho da sonda endotraqueal adequado.
2. Remover o dispositivo da embalagem em condições assépticas.
3. A Sonda Endotraqueal Sem Balão Well Lead deve ser introduzida exclusivamente pelo médico, através da boca ou nariz, com auxílio de um laringoscópio, dentro da traqueia do paciente.
4. Após a intubação auscultar ambos os campos pulmonares. Se os sons respiratórios estiverem diminuídos em um campo pulmonar ou ausente em um ou em ambos, ajuste no tubo são necessários.
5. O correto posicionamento da sonda endotraqueal deve ser confirmado através da visualização da posição do tubo na radiografia de tórax.

COMPOSIÇÃO

As Sonda endotraqueais sem balão Well Lead são dispositivos de uso único e estéreis para intubação oral e/ou nasal para gestão das vias respiratórias.

A sonda endotraqueal sem balão Well Lead é composta por tubo de PVC (cloreto de polivinila), curvado anatomicamente, sua ponta distal é biselada. A ponta proximal possui um conector de 15mm em polipropileno compatível com as conexões do circuito. O diâmetro interno varia de 2 a 8.5mm.

Partes e materiais:

Tubo - PVC (cloreto de polivinila)

Conector - PP (polipropileno)

VALIDADE

Válido por 05 anos a contar da data de fabricação.

Produto estéril a óxido de etileno.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Armazenar em local seco, arejado e abrigado da luz do sol.

Transportar na embalagem original.



Retirar da embalagem em condições assépticas.

A Sonda Endotraqueal deve ser introduzida exclusivamente pelo médico, através da boca ou nariz, com o auxílio de laringoscópio, dentro da traqueia do paciente.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O fabricante recomenda o uso único.

Estéril a menos que a embalagem esteja aberta ou danificada.

Não usar se a embalagem estiver danificada.

Usar imediatamente após abrir a embalagem.

Não reesterilizar.

Trabalhar em condições assépticas.

O tempo máximo de permanência da sonda endotraqueal no paciente é de 29 dias. Portanto, deve-se trocar ou remover a sonda a cada 29 dias. A utilização por períodos superiores ao indicado compromete a integridade do produto e por consequência a segurança do paciente.

CONTRAINDICAÇÕES

O uso da sonda endotraqueal em procedimentos que envolvam o uso de laser ou de eletrodo eletro cirúrgico na área próxima ao dispositivo é contraindicado.

Pacientes que sofram de edema, inflamação ou hemorragia na garganta e trauma na vertebra do pescoço o uso da sonda é contraindicado.

EFEITOS ADVERSOS

Inicialmente muitos pacientes relatam desconforto com a sonda endotraqueal, o que leva muitas vezes o paciente a tossir ou ter ânsia de vômito. Ao longo do tempo de uso da sonda o desconforto inicial desaparece. Durante a intubação o trato respiratório pode ser ferido.

FABRICADO POR:

Well Lead Medical Co., Ltd

C-4 #Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, P.R. China

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Ltda

Alameda África, 570 – Tamboré – Santana de Parnaíba – SP

Cep 06543.306 Sac 0800.7701667

Resp Técnica: Enfa Lucia Akemi Higa

Reg MS: 10150470330

Alameda África, 570 - Gleba Y Polo Empresarial Tamboré

CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP

PABX: (11) 4152-0500 - Fax (11) 4152-0524 - Televendas 0800 554999

E-mail: comercial@cfernandes.com.br

Site: www.cfernandes.com.br