

Produto: Medix Brasil – Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>A Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado - Medix Brasil possui pinça corta-fluxo e válvula de drenagem inferior, capacidade 2000ml, transparente, graduada, em PVC, embalada individualmente, esterilizada por Óxido de Etileno, possui saco de armazenamento, tubo de entrada, tubo de descarga, conector, tampa do conector e interruptor de descarga.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>A Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado - Medix Brasil, é usada para a coleta de urina do paciente com incontinência, com incapacidade de urinar, paralisado, paciente de longo prazo acamado, pacientes submetidos a processos cirúrgicos onde há necessidade de esvaziamento da bexiga.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada em PVC ✓ Estéril – processo de óxido de etileno ✓ Sistema Fechado ✓ Capacidade de 2000mL ✓ Possui: <ul style="list-style-type: none"> - Válvula de drenagem inferior (ponto de descarte) “Torneira T” - Válvula anti-refluxo - Tubo extensor de 100cm fabricado em PVC transparente (diâmetro interno 7mm e diâmetro externo 9mm) - Conector escalonado com tampa protetora - Clamp corta fluxo - Alça para transporte - Ponto de coleta ✓ Não possui filtro antibacteriano; ✓ Não possui filtro de ar; ✓ Não possui câmara de Pasteur; ✓ Validade 5 anos após data de esterilização ✓ Descartável, de uso individual e por procedimento
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem primária: bolsa coletora acondicionada individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 100 unidades de bolsa de urina.</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Certifique-se da perfeita sondagem e posicionamento da sonda de foley; Inspeção visualmente o produto quanto a alguma imperfeição, deterioração superficial, integridade da embalagem e prazo de validade antes do uso; Feche a pinça do tubo extensor e do tubo de saída;</p>

	<p>Retirar a tampa do conector e aplicar a sonda de foley, de modo que essa ultrapasse toda a superfície de contato; O profissional habilitado retira a tampa de proteção do conector para depois conectar a bolsa coletora ao adaptador do cateter vesical; Posicione a tubulação para assegurar um refluxo sem obstáculos para a bolsa de drenagem; Abrir pinça do tubo extensor; Pendure a bolsa de drenagem no suporte da cama; Para coleta de amostras, utilizar ponta de coleta com membrana auto cicatrizante; A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente. Se uma coluna imóvel de urina for observada, cheque quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a uma obstrução física. Se o posicionamento correto e a remoção da obstrução não permitir o fluxo livre, a bolsa pode necessitar ser trocada; Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, a enfermeira abre a pinça do tubo de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo de maneira apropriada; Por ser um produto de uso individual e por procedimento, após o uso descarte-o e destrua.</p>
<p>PRECAUÇÕES, RESTRICÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL” Ler atentamente as Instruções de Uso; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas. Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.</p>
<p>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</p>	<p>As Bolsas Coletora de Urina Sistema Fechado - Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR N° 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR N° 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

