


Produto: Medix Brasil – Seringas Hipodérmicas Descartáveis, sem agulha.

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>As Seringas Hipodérmicas sem agulha Medix Brasil são um dispositivo descartável composto de um cilindro e um êmbolo. Possui modelos com bico luer lock, e modelos com bico luer slip.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>Desenvolvidas para a aspiração e aplicação de líquidos e/ou medicamentos em hospitais farmácias, clínicas e laboratórios pelas vias hipodérmicas.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricadas em Polipropileno, polímero inerte, ou seja, não reage com medicamentos; ✓ Estéreis – ETO ✓ Lubrificadas com silicone: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo; ✓ Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado; ✓ Anel de retenção: impede o desprendimento do êmbolo; ✓ Êmbolo de borracha natural (látex) ✓ Modelos: Bico Luer Slip e Luer Lock; ✓ Sem agulha; ✓ Tamanhos: 3,0/ 5,0/ 10/ 20 e 60mL; ✓ Escala volumétrica demarcada em mililitros; ✓ Certificação INMETRO; ✓ Validade 5 anos após data de esterilização; ✓ Atóxicas e apirogênicas; ✓ Descartáveis e de uso único.
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3ml: 3600 unidades - 5ml: 2400 unidades -10ml: 1800 unidades -20ml: 600 unidades -60ml: 400 unidades
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Selecionar o tipo de seringa a ser utilizada conforme sua graduação. Abrir a embalagem através da técnica asséptica (sempre através da pétala); Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamentos ou coletas de fluídos orgânicos;</p>
<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p>“PRODUTO DE USO ÚNICO”, “NÃO DEVEM SER REUTILIZADAS”, “PROIBIDO REPROCESSAR”, “DESTRUIR APÓS O USO”; “ESTÉRIL” “Ler atentamente as Instruções de Uso”; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.</p>

Medix

BRASIL

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As Seringas Hipodérmicas descartáveis sem agulha Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

