

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **Seringa Hipodérmica para Insulina sem agulha Seringa Estéril de uso único para Insulina sem agulha**

Fabricado por:

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Av. Comendador José Zillo nº 160

Distrito Industrial I - Ourinhos - São Paulo - CEP: 19908-170

Indústria Brasileira - CNPJ: 59.309.302/0001-99

Inscric. Est.: 495.044.013.118

Fone / Fax: (014) 3302-2900

Home Page: [www.injex.com.br](http://www.injex.com.br)

Registro ANVISA nº: 10160610025

Responsável Técnico: Luiz Saldanha Rodrigues Neto CREA-SP 5061280667

SAC: 0800-770 60 80

### **Instruções de Uso**

- Abrir o blister de forma asséptica;
- Conectar a agulha;
- Aspire o medicamento lentamente para evitar formação de bolhas;
- Após aspirar a dose prescrita pelo médico apertar lentamente o êmbolo para retirar o ar e garantir que não permaneceu nenhuma bolha de ar dentro da seringa.
- Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação.
- Realizar a aplicação. Injetar o medicamento até o final fazendo com que o êmbolo chegue ao final do cilindro. Retirar a seringa e colocar algodão seco no local.
- Descarte a seringa e agulha em local apropriado, após o uso.