

**BOLSA PRESSÓRICA REUSÁVEL FOYOMED
INSTRUÇÕES DE USO**

INDICAÇÃO DE USO

A Bolsa de Infusão de Pressão é adequada para pacientes que precisam de infusão urgente e transfusão de sangue em atendimento de emergência clínica, unidade de terapia intensiva, departamento de anestesia e outras situações clínicas. Também pode ser usada para primeiros socorros em situações especiais, como primeiros socorros em campo, desastres naturais primeiros socorros, etc.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Abrir a embalagem;
2. Inserir a frasco da solução na bolsa pressurizadora;
3. Girar a válvula à direita e insuflar a bolsa pelo insuflador (pera);
4. Para manter a bolsa pressurizada, manter a válvula para cima, ou seja, oposta ao insuflador;
5. Para despressurizar, girar a válvula sentido insuflador, se certificar que a bolsa esvaziou e após retirar o frasco;
6. O produto deve ser higienizado quando o profissional da saúde identificar a necessidade
7. Higienização com tecido limpo embebido em álcool.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Deve ser conservado em local de boa ventilação, limpo, escuro, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70% e sem nenhum gás corrosivo.

Transportar o produto em local de boa ventilação e limpo, em temperatura ambiente e sem gás corrosivo.

Manipular o produto em local limpo e à temperatura ambiente. Não expor diretamente ao sol, nem à umidade extrema. Seguir as instruções de uso.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

1. O fabricante recomenda o uso único em um mesmo paciente a fim de evitar infecção cruzada.
2. Abra e use imediatamente. Não usar se a embalagem externa estiver danificada.
3. Não usar se estiver fora do prazo de validade.
4. O produto deve ser armazenado em ambiente fresco, abrigado da luz solar. Não usar o dispositivo sem a orientação de um profissional qualificado;
5. Produto não estéril.



FABRICADO POR:

Ningbo Albert Novosino Co., Ltd.

No.1 Xinheng 3rd Road, Private Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province, China

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Ltda

Alameda África, 570 – Tambore – Santana de Parnaíba – SP

Cep 06543.306 Sac 0800.7701667

Resp Técnica: Enfa Lucia Akemi Higa

Reg MS: 10150479088

Alameda África,570 - Gleba Y Polo Empresarial Tamboré

CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP

PABX: (11) 4152-0500 - Fax (11) 4152-0524 - Televendas 0800 554999

E-mail: comercial@cfernandes.com.br

Site: www.cfernandes.com.br