

## INSTRUÇÃO DE USO

### (CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES GRANDESC)



#### INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

A Caixa Coletora de perfuro cortante é fabricada em papelão ondulado, papel couro e sacola plástica nas medidas conforme (lista abaixo):

- 1,5L;
- 3L;
- 7L;
- 13L;
- 20L;
- 30L;
- 60L;
- 90L.

#### COMPOSIÇÃO

- Coletor perfuro-cortante: Papelão ondulado, papel couro e sacola plástica composta de polietileno.
- Amarelo com fundo de montagem automática

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e arejado. A estocagem deve respeitar os limites de empilhamento.

#### INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO

O Coletor Perfuro cortante Grandesc é fabricado conforme as NBR 13853, com as principais matérias-primas, o que garante total proteção contra objetos perfurocortantes e vazamentos de líquidos contaminados. Além de ter uma fácil e rápida montagem.

O fundo e a cinta lateral são feitos de papelão couro. A parte externa e a bandeja são de papelão ondulado. O fundo é bem rígido, o que proporciona estabilidade à caixa. A bandeja e o saco plástico, na parte interna, evitam o vazamento de fluídos. O fechamento da caixa perfuro cortante Grandesc é feito com a trava e a contra trava de segurança para que os materiais não saiam do coletor durante o transporte ou descarte.

#### **PRECAUÇÕES DE USO**

- Não desconectar, reencapar ou entortar agulhas usadas;
- Todo material que perfura ou corta deve ser descartado no coletor;
- Não despejar os materiais perfuro cortantes em lixo comum;
- Nunca exceder o limite de enchimento do coletor (linha pontilhada);
- Para descartar o coletor, lacrar a tampa e transportar pelas alças, afastado do corpo;
- Após usar e fechar, destinar conforme normas inerentes;
- Destruir após o uso, conforme legislação ambiental vigente;
- Na falta de qualquer item do coletor não utilizá-lo.

#### **PRAZO DE VALIDADE**

Este produto é válido por 5 anos a partir da data de fabricação.

#### **ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS**

Artigo Médico Hospitalar - Uso Único - Descartar após o Uso.  
Produto Não Estéril.

**ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR - USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS O USO**

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**

#### **FABRICANTE:**

#### **GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI.**

Rua Goiás, nº 121 – Chácara do Solar 1- Fazendinha

Cep.: 06.530-040 – Santana de Parnaíba – SP

CNPJ 07.086.868/0001-03

Indústria brasileira

#### **SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - S.A.C**

Tel.: (0xx 11) 2107-1177

**Autorização de Funcionamento:** 8.03.066-4 (K276M3X076YH)

**Reg. ANVISA nº.: 80306640001**

**Resp. Técnico:** Caroline Santin Darcie de Almeida


CRF-SP 68.346



Representante Legal

Vagner Story Monteiro de Almeida

Rg. n.º 11.120.030-1

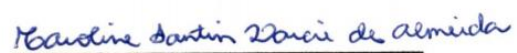

Responsável Técnica

Caroline Santin Darcie de Almeida

CRF-SP 68.346