



## CURATIVO EM ESPUMA DE POLIURETANO VITALDERME

REGISTRO ANVISA 10296900070

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Limpar adequadamente a ferida, conforme rotina, preferencialmente com solução fisiológica 0,9%, assegurar que não haja partículas contaminantes ou óleos, que impeçam que o curativo forme uma barreira vedante e segura ao redor da ferida, e secar o local antes da aplicação do curativo.
- 2 - Selecionar o tamanho adequado de Vital Derme que deverá ser 2cm maior que a área da ferida para melhor assegurar a aderência do curativo na pele.
- 3- Remover a película protetora, e aplicar o curativo, evitando contato com sua parte interna para não o contaminar.
- 4 - A troca do curativo deverá obedecer a rotina da instituição ou sempre que ficar branco e se expandir, ou mesmo descolar.
- 5 - Poderá ocorrer a formação de um gel, resultado da mistura do exsudados e do hidrocoloide, que poderá ter a aparência de secreção, o que é incorreto, apenas basta limpar o local conforme preconizado.
- 6 - Se a ferida apresentar profundidade maior que 5mm, deverá ser utilizado um curativo tratamento adequado, antes de usar o curativo hidrocoloide como cobertura.
- 7 - Não deve ser usado em feridas muito exsudativas.
- 8 - Vital Derme é de fácil remoção, pois não adere à ferida. Para remover o curativo, levantar cuidadosamente uma de suas extremidades, mantendo-o pressionado contra a pele. Proceder deste modo, ao redor da base da ferida, até que todas as extremidades deixem de estar em contato com a pele. Limpar a ferida e aplicar novo curativo, se indicado.



## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado por radiação gama

Respeitar o prazo de validade

Se a ferida apresentar profundidade maior que 5mm, deverá ser utilizado um curativo adequado para o tratamento, antes de usar o curativo hidrocoloide como cobertura.

Não deverá ser utilizado em feridas muito exsudativas. Em caso de alergias, descontinuar o uso do produto.

O produto não é indicado para feridas infectadas, feridas com exposição óssea, muscular ou de tendões, vasculites e queimaduras de terceiro grau.

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Produto com reprocessamento proibido, tendo em vista que a especificações técnicas do produto há impossibilidade de reprocessar devido a perda de funcionalidade e integridade do mesmo.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

O produto não é indicado para feridas infectadas, feridas com exposição óssea, muscular ou de tendões, vasculites, queimaduras de terceiro grau.

Os Curativos Hidrocolide Vital Derme não devem ser utilizados em áreas doadoras de enxertos de pele e períodos de granulação e epitelização de feridas.



## **ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

## **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33  
Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joaomed.com.br](http://www.joaomed.com.br)  
Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

## **IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO**



**Normal**



**Região sacral**



**Ultra-fino**



**Plus**