



Revisão: **04/07/19**
Vigência: 05/07/19

Germi Rio Pronto Uso

Elaborador (a)	Larissa Engel Assuntos Regulatórios	
Aprovador (a)	Ana Paula Marcheto Sup. Pesquisa e Desenvolvimento	
Homologador (a)	Iuri Visquetto Gerente SGQ	

Cópia Não Controlada

1. CATEGORIA: **DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO.**

2. FINALIDADE: O **Germi Rio®** é um desinfetante de nível intermediário, também indicado para superfícies fixas e artigos não críticos cuja fórmula exclusiva limpa e desinfeta em um mesmo processo. Produto composto de uma mistura de cloreto de didecildimetilamônio, biguanida e coadjuvante, pronto para uso, que garante eficácia em superfícies fixas, artigos não críticos, artigos de inaloterapia e assistência respiratória.

Ideal para uso em hospitais, principalmente em áreas críticas com maior chance de risco de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde.

Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos. Sua aplicação é segura em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC, vinil, látex, monitores, telas de LCD, bombas de infusão, incubadoras, transdutores, etc. Possui eficácia comprovada em presença de sujidade (matéria orgânica).

POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA: *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Trichophyton mentagrophytes, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis e H1N1/Influenza.*

3. MODO DE USAR: **ESPUMA:** Gire o bico do pulverizador até a posição on e pressione o gatilho até a formação de espuma necessária.

SPRAY: Gire o bico do pulverizador até a posição on, na sequência abra o dispositivo que se encontra na ponta do bico, depois pressione o gatilho até a formação de spray.

Para superfícies fixas: Nunca aplicar o produto diretamente nas superfícies dos eletroeletrônicos, sempre aplicar primeiro no pano ou mop e depois aplicar na superfície a ser limpa e desinfetada. Deixar agir por 1 minuto sem necessidade de enxágue. O processo de limpeza e desinfecção deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou conforme protocolos existentes.

Para Artigos Não Críticos: Que tenham contato direto com a pele íntegra do paciente, lavar o material, secar e imergi-los na solução deixando em contato por 5 minutos. Após aplicação do produto, os artigos deverão ser enxaguados e secos antes do uso. Utilizá-los o mais breve possível (ex.: estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro, etc.).

Para Artigos de Inaloterapia e Assistência Respiratória: Primeiramente deve-se lavar, enxaguar e secar os artigos para depois imergi-los no produto.



Cópia Controlada

Deixar em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

4. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Manter o frasco protegido do sol e do calor.
Usar equipamentos de proteção individual adequados tais como: luvas, máscaras, óculos de proteção e avental.
Conservar em local fresco. Proteger da luz.

NÃO INGERIR.

CONSERVE O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não misturar com outros produtos. Manter em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

Lave os objetos ou utensílios usados, como medida antes de reutilizá-los.

5. PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar imediatamente as partes atingidas com água corrente em abundância durante 15 minutos e procure socorro médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar a **CENTRAL DE INTOXICAÇÃO** ou **SERVIÇO DE SAÚDE** mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e chame socorro médico.

Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente.

6. CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C).

7. COMPOSIÇÃO:

Cloreto de Didecildimetilamônio, Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), Coadjuvante, Sequestrante, Conservante e Água.

PRINCÍPIO ATIVO: Tensoativo Catiônico - 0,55% p/p, Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB) - 0,1% p/p.

8. REGISTRO ANVISA:

REGISTRO NO MS Nº 3.1329.0357.

9. VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

10. APRESENTAÇÕES COMERCIALIZADAS:

750 mL spray/espuma
1 L
5 L

11. VERSÃO:

VE022018

12. ANEXOS / REGISTROS

Código do Anexo	Descrição do Anexo	Local de Guarda	Tempo de Guarda
Anexo 1	Rótulo do produto	Arquivo eletrônico no sistema Protheus.	Não aplicável.



RIOQUÍMICA
Indústria Farmacêutica

FICHA TECNICA

FT0015 - 000

Revisão: **04/07/19**
Vigência: 05/07/19

Germi Rio Pronto Uso

Cópia Controlada

13. HISTÓRICO DE REVISÃO

000- Criação do documento.