

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-064-A
	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 1 de 2

### Compressa de Gaze Hidrófila Não Estéril

#### 1. Informações da Empresa

**Razão Social:** Amed S/A

**CNP:** 10.403.238/0001-11

**Endereço:** Rodovia BR 135 Km 628 + 930 m; S/N; Zona Rural; Curvelo/MG; CEP: 35.797-899

**AFE:** 8.14819.0

**Responsável Técnico:** Bárbara Pereira Mendes

#### 2. Descrição do Produto

- Nome Técnico: Compressa
- Nome Comercial: Compressa de Gaze Hidrófila Não Estéril
- Notificação na ANVISA: 81481900005
- Tecido 100% algodão, plano, de baixa densidade de fios por centímetro, ligamento tafetá (tela), alvejado (isento de amido, corantes corretivos e alvejante óptico), inodoro e insípido com cinco dobras e oito camadas. Apresenta-se não estéril e sem fio radiopaco firmemente fixado ao seu corpo;
- Confeccionadas em tecido macio e neutro;
- Altamente absorventes, isentas de impurezas;
- Embaladas em embalagens Plásticas ou filme de plástico Bopp;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

#### 3. Apresentação do Produto

- Produzidas com 5 dobras e 8 camadas;
- Densidade: 9, 11 ou 13 fios/cm<sup>2</sup>;
- Embalagem com 10 ou 300 ou 500 unidades;
- Dimensional fechada: 7,5 cm x 7,5 cm u 10 cm x 10 cm;
- Dimensional aberta: 14 cm x 20 cm; 14 cm x 22 cm; 14 cm x 24 cm; 15 cm x 24 cm; 14 cm x 26 cm; 15 cm x 25 cm; 15 cm x 30 cm; 18 cm x 30 cm; 19 cm x 30 cm; 19 cm x 32 cm; 19 cm x 34 cm; 20 cm x 32; 20 cm x 34; 18 cm x 34 cm; 18 cm x 38 cm; 19 cm x 38 cm ou 20 cm x 40 cm.
- Sem fio radiopaco.

#### 4. Indicação de Uso/Finalidade


A Compressa de Gaze Hidrófila Não Estéril é indicada para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) antiaderente na contenção de hemorragias, intervenções cirúrgicas e para curativos. Podem também ser usadas para remoção de esmaltes e maquiagem, limpeza facial e higienização de bebês.

#### 5. Instrução de Uso

Retirar as compressas de gaze da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada que necessite que o sangue e/ou as secreções sejam absorvidos ou sobre a área da ferida aberta ou em curativos de forma geral. Aplicar sobre área que precisa ser higienizada. Aplicar sobre as unhas para a remoção de esmaltes e no rosto para a remoção da maquiagem.

#### 6. Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto.

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-064-A
	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Versão: 02 Data de Emissão: 21/02/22 Pág: 2 de 2

Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

#### **7. Precauções, Restrições e Advertências**

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de Gaze para sua utilização.
- A esterilização das compressas pode ser realizada utilizando os métodos de esterilização por óxido de etileno, raios gama ou autoclave a vapor.

#### **8. Contraindicações**

Não se aplica.

#### **9. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

CÓPIA CONTROLADA