

INSTRUÇÃO DE USO

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - MAXY NUTRE

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

A sonda de alimentação enteral Maxy - Nutre é produzida em poliuretano, inerte, flexível e biocompatível, com ou sem a linha radiopaca e graças as características da matéria prima pode permanecer por longos períodos no paciente, dispensa a lubrificação e também não provoca a incrustação da dieta nas paredes do tubo. O produto mantém a sua flexibilidade mesmo dentro do tubo digestivo apesar da acidez do suco gástrico. A sonda para alimentação enteral será embalada individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado e acondicionado em caixa de papelão com 25 unidades. Esterilizado por óxido de etileno, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO / FINALIDADE: Indicado para administração de dietas enterais, via naso gástrica, em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar normalmente.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO CONSERVAÇÃO - MANIPULAÇÃO:

Transportar e estocar o produto em local seco, em temperatura ambiente evitando exposição ao sol, poeira, calor excessivo, e umidade. A manipulação deverá ser realizada por um profissional habilitado e com o domínio da técnica exigida para este procedimento.

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO: TÉCNICAS DE USO:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica. Introduzir a sonda até o estomago conforme técnica médica. Com a sonda posicionada iniciar a alimentação enteral. O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado e com o domínio da técnica exigida para este procedimento.

PRECAUÇÕES DE USO:

Este produto somente deve ser usado por profissionais da área médica que possuam conhecimento com as técnicas usadas para este procedimento.

Usar técnica asséptica.

A Mark Med não se responsabiliza por danos causados ao paciente quando o produto for manuseado de maneira imprópria ou por pessoal não qualificado.

Os procedimentos acima citados são somente um guia, o uso do material deve ser baseado no treinamento clínico de cada profissional da área médica a qual se destina o produto. Material descartável de uso único- não pirogênico, estéril, não reutilizar.

Verifique a integridade da embalagem e a validade do produto antes de utilizá-lo.


O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada, danificada ou úmida.

ADVERTÊNCIAS:

Verificar a integridade da embalagem, não usar caso a embalagem esteja aberta ou danificada, observar o prazo de validade e não usar caso esteja vencido. Esterilizado por óxido de etileno ou radiação ionizante. Não reutilizar. O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com os devidos cuidados exigidos pela área médica-hospitalar.

CONTRA INDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

Este produto não apresenta contra indicações e nem efeitos adversos. Recomendamos o uso por profissional habilitado e com o domínio da técnica exigida para este procedimento.

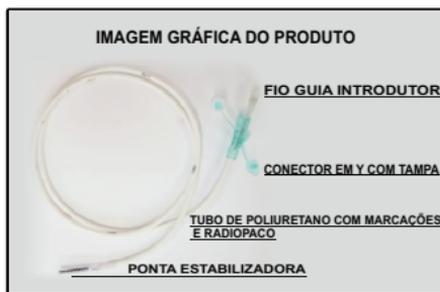

MODELOS E CÓDIGOS COMERCIAIS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO	CALIBRE
MAXY NUTRE Fr 8	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	8 Fr
MAXY NUTRE Fr 10	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	10 Fr
MAXY NUTRE Fr 12	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	12 Fr
MAXY NUTRE Fr 14	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	14 Fr

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR

DESTRUIR APÓS O USO

USO ÚNICO-PROIBIDO REPROCESSAR - ESTÉRIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LILIA MARA F. BUENO

CRF/SP N.º 87381

FABRICADO POR:

MARK MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 27
Bairro Penha CEP: 12929-460 - Bragança Paulista - SP
CNPJ(MF).59.556.621/0001-07 - TEL/FAX.:(0**11)4035-6272
e-mail:markmed@markmed.com.br - AUT.FUNC.ANVISA/MS N°1020782
INDÚSTRIA BRASILEIRA
MS:1.02078.200-24