

Instruções de Uso

TUBO DE LÁTEX PREMIUM

Fabricante: Targa Medical S.A.

Endereço: Av. Irmãos Spino, 536 – Cerâmica / Paraíba do Sul – RJ, CEP 25850000.

Nome Comercial do Produto: Tubo de Látex Premium

Modelo Comercial do Produto: Tubo de Látex Premium, não estéril, parede interna lisa, espessura uniforme, meada de 15 metros com até 3 emendas, cor natural.

Tamanhos: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210

ANVISA: 80256170025

Condições de armazenamento, conservação e transporte:

- Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.
- Armazene em local arejado, seco e fresco.
- Transporte em e veículo de carga seca, a temperatura ambiente.

Instruções para uso do produto:

- Utilizar para garroteamento de flebotomia; Transporte de gases e outros fluídos; Conexão entre componentes de produtos médicos.
- Escolher a bitola a ser utilizada;
- Cortar na medida desejada;
- Conectar as pontas do tubo nas extremidades;
- Certificar-se que não tem vazamento e está pronto para o uso.

Advertências e precauções:

- Recomenda-se o uso único.
- Contém látex natural. Pode causar alergia.
- Validade de 2 anos após a sua fabricação, desde que mantidas as condições de estocagem;
- Em caso de necessidade, esterilizar a 1,5 atm de pressão a 125° - 15 min.



Priscila Helena Ribeiro

Responsável Técnica

CRQ/RJ 03251867

TARGA MEDICAL S.A

Sede: Av. Irmãos Spino, 536 – Bairro Cerâmica – CEP 25850-000 – Paraíba do Sul, RJ – Brasil | Tel.: +55 24 2263 8747

Escritório: Av. Nilo Peçanha, 50 – Centro – CEP 22020906 – Rio de Janeiro, RJ | Tel.: +55 21 2132 8020

www.lemgruber.com.br