

SERINGAS PARA INSULINA COM AGULHA- UNIQMED

Indicação:

As Seringas para Insulina com Agulha - Uniqmed são produtos de finalidade médica, para administração de medicamentos como a insulina e consistem em um tubo graduado e um êmbolo móvel, conectados a agulhas.

Instruções de Uso:

1. Para expor o êmbolo, gire a tampa inferior e puxe para desconectar;
2. Para expor a agulha, gire a tampa superior e puxe para desconectar. Tenha cuidado para não danificar a agulha;
3. Para ajustar a dose corretamente utilize a linha superior da ponta do êmbolo, ajustando a dose na escala de graduação impressa no corpo da seringa;
4. Utilize a seringa apenas uma vez. Descarte a seringa e a agulha em recipiente apropriado após o uso.

Composição:

Cilindro-Polipropileno
Êmbolo-Polipropileno
Vedação-Poliisopreno
Agulha-Aço Inoxidável 304L
Tampa-Polietileno

Armazenamento e Conservação:

Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente, ao abrigo da luz.

Precauções:

- Não utilizar se a embalagem interna estiver danificada;
- Produto de uso único, descartar após o uso;
- Para pacientes que utilizam mais de um tipo de insulina;
- Não altere a ordem da mistura prescrita pelo médico;
- Não altere o modelo e a marca da seringa e agulha sem consultar o médico ou farmacêutico;
- Siga estas recomendações para evitar erros de dosagem.

Contra indicações:

Não aplicável.



Nome técnico:	SERINGAS DESCARTAVEIS	Validade:	05 anos		
Método de esterilização: Esterilizado por Óxido de Etileno					
Apresentação:	<ul style="list-style-type: none"> - Caixa com 10 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 20 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 50 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 100 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 100 unidades, embaladas de 10 em 10 unidades; - Caixa com 200 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 200 unidades, embaladas de 10 em 10 unidades; - Caixa com 1000 unidades, embaladas individualmente; - Caixa com 1000 unidades, embaladas de 10 em 10 unidades; 				
Modelo:	<p>Seringa estéril de uso único para insulina com agulha fixa</p> <p>Modelos: Seringas para Insulina com Agulha- 1mL/CC (100 UI), 0,5mL/CC (50UI) e 0,3mL/CC (30UI):</p> <p>Agulhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13mm x 0,40mm(27G) 13mm x 0,36mm (28G) 13mm x 0,33mm (29G) 13mm x 0,30mm (30G) 13mm x 0,25mm(31G) 12,7mm x 0,40mm(27G) 12,7mm x 0,36mm (28G) 12,7mm x 0,33mm (29G) 12,7mm x 0,30mm (30G) 12,7mm x 0,25mm(31G) 10mm x 0,23mm(32G) 8mm x 0,30mm (30G) 8mm x 0,33mm (29G) 8mm x 0,25mm (31G) 8mm x 0,26mm (31G) 8mm x 0,23mm(32G) 6mm x 0,30mm (30G) 6mm x 0,33mm (29G) 6mm x 0,25mm (31G) 6mm x 0,23mm(32G) 5mm x 0,23mm(32G) 5mm x 0,25mm(31G) 5mm x 0,26mm(31G) 4mm x 0,30mm (30G) 4mm x 0,25mm (31G) 4mm x 0,23mm (32G) 				
ANVISA/MS:	10098710053	Classe de Risco:	II	Validade do Registro:	Vigente
Fabricante:	FEEL TECH BIO CO., LTD.				
Origem:	CORÉIA DO SUL				

Revisão.00

