

PUNCH PARA BIOPSIA UNIQUMED

Indicação:

O Punch para Biopsia Uniqmed é constituído de uma lâmina em aço inoxidável, afiada e cilíndrica, acoplada a um cabo plástico arredondado. A incisão na pele é feita realizando um movimento de rotação nos dois sentidos (horário e anti-horário), aplicando uma leve pressão, atingindo a epiderme e derme, e por vezes a gordura subcutânea. O produto está disponível em diversos modelos com lâminas de diferentes diâmetros, para serem utilizados em diferentes áreas da pele e permitir a obtenção de amostras para testes de biópsia.

Instruções de Uso:

- PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL
- Escolha o modelo adequado do produto para realizar o procedimento;
- Checar a integridade da embalagem e data de validade;
- Fazer a assepsia do local da biópsia adequadamente;
- Abrir a embalagem assepticamente;
- Esticar a pele utilizando os dedos polegar e indicador.
- Fazer a incisão através de um movimento de rotação no sentido horário e anti-horário, aplicando uma leve pressão sobre a pele para permitir a penetração do instrumento no tecido. A pele perfurada vai se levantar acima do nível da pele ao redor.
- Após a profundidade desejada ser atingida, remover o Punch para Biópsia.
- Remover o tecido cuidadosamente com pinça estéril e suturar a incisão.
- Descartar o Punch em recipiente apropriado conforme legislação vigente.

Composição:

Tampa: Polietileno de baixa densidade (LDPE)
Lâmina: Aço Inoxidável 304S
Composição do aço inoxidável 304 S
Cabo: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)

Armazenamento e Conservação:

Armazenar em local seco e fresco.
Armazenar em temperatura de 10°C a 40 °C e umidade relativa do ar de 35% a 65 %
Evitar exposição à luz solar direta.
Manter afastado de crianças.

Precauções:

- Produto para uso profissional
- Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada;
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade;
- Os produtos são extremamente afiados, cuidado ao manusear;
- A esterilidade é mantida até que a embalagem individual permaneça intacta;
- Não utilizar em cirurgias cardíacas/oftálmicas.

Contra indicações:

- Não utilizar em cirurgias cardíacas/oftálmicas.

Nome técnico:	INSTRUMENTO PARA BIOPSIA			Validade:	05 anos
Método de esterilização:	Esterilizado por raios gama.				
Apresentação:	Caixa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 unidades.				
Modelo:	PBU1. 0; PBU1.5; PBU 2.0; PBU 2.5; PBU 3.0; PBU 3.5; PBU 4.0; PBU 4.5; PBU 5.0; PBU 5.5; PBU 6.0; PBU 6.5; PBU 7.0; PBU 7.5; PBU 8.0; PBU 8.5; PBU 9.0; PBU 9.5; PBU 10.0; PBU 12.0; PBU 15.0				
ANVISA/MS:	80155479021	Classe de Risco:	II	Validade do Registro:	Vigente
Fabricante:	Paramount Surgimed Ltd.				
Origem:	India				

Revisão.00