

BOLSAS PARA ÁGUA QUENTE**Indicação:**

A Bolsa para Água Quente é utilizada para aplicação de calor local.

Instruções de Uso:

Importante: Não utilizar água fervente para colocar na bolsa. A temperatura da água deve estar abaixo de 80°C.

- Abrir a rosca de vedação e segurar a bolsa pelo gargalo em posição vertical com a base apoiada em uma superfície.
- Despejar a água quente cuidadosamente no seu interior, respeitando a capacidade máxima indicada que é de 2/3 do volume total da bolsa.
- Feche a bolsa, girando a rosca de vedação.
- Deite a bolsa em uma superfície plana e levante-a com o bocal voltado para baixo para verificar se a rosca está bem fechada e não apresenta vazamentos no bocal.
- Ao utilizar a bolsa, envolva-a totalmente em uma toalha ou capa, mantendo a aplicação do calor por 20 minutos, ou a critério de um profissional da área de saúde.
- Nunca aplique a bolsa diretamente sobre a pele.

Composição:

Bolsa: Borracha Natural

Tampa, bocal e rosca: Plástico Polipropileno (PP)

Capa Protetora: Flanela

Armazenamento e Conservação:

Quando não estiver em uso, esvazie a bolsa completamente e guarde-a com a tampa aberta.

Guarde a bolsa longe de substâncias ácidas, corrosivas e materiais cortantes ou pontiagudos.

Antes de nova utilização, cheque se a bolsa está danificada ou possui vazamentos enchendo-a com água fria.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade.

Precauções:

O uso inadequado da bolsa para água quente pode causar queimaduras. Durante a aplicação, envolva totalmente a bolsa com uma capa, pano ou toalha, evitando o contato do produto direto com a pele.

-Pessoas com sensibilidade ao calor ou com problemas circulatórios devem consultar um profissional de saúde/médico antes de aplicar o produto.

-O uso em crianças deve ser supervisionado constantemente por um adulto.

-Não utilize água fervendo (temperatura máxima 80°C).

- Nunca aqueça a bolsa em qualquer fonte de calor (fogão, forno, micro-ondas, ou outros).

- Antes de aplicar a bolsa, verifique se ela não apresenta vazamentos, deformações, trincas ou rachaduras, ou se tem as paredes pegajosas. Se apresentar alguma destas características, ela pode estar danificada internamente, por isso descarte o produto.

- Sugerimos que você troque a sua bolsa a cada dois ou três anos de uso, sempre observando as características mencionadas acima.

- Contém látex (borracha natural) em sua composição, por isso, deve ser evitado por pessoas que apresentam sensibilidade ao material.

Contra indicações:

Não aplicável



Nome técnico:	Bolsa (de Água, Silicone, Gel, Gelo, Outras)	Validade:	Indeterminado
PRODUTO NÃO ESTÉRIL			
Apresentação:	Caixa com 1 unidade; Caixa com 2 unidades; Caixa com 3 unidades com ou sem Capa Protetora.		
Modelo:	Bolsas para Água Quente UNIQCARE 200mL; 400 ml; 500mL; 600ml; 800mL; 950mL; 1000ml; 1200mL; 1400mL; 1800mL; 2000ml. Bolsas para Água Quente UNIQMED 200mL; 400 ml; 500mL; 600ml; 800mL; 950mL; 1000ml; 1200mL; 1400mL; 1800mL; 2000ml.		
ANVISA/MS:	10098710077	Classe de Risco:	I
		Validade do Registro:	Vigente
Fabricante:	PISTISTECH CO.,LIMITED		
Origem:	China		

Revisão.01

