



**FARMATEX DO BRASIL S/A.**

CNPJ: 21.284.068/0001-10 - Inscrição Estadual: 9068178611

Rua: Doutor Egon Armando Krueger, 189-B - Cidade Industrial

CEP: 81350-020 – Curitiba – PR – Fone/Fax: 41 30787760

**Produto:** EXTENSOR MULTIVIAS FARMATEX

**Registro Anvisa:** 81175930009

**Origem:** CHINA, REPÚBLICA POPULAR

**Modelo Produto Médico:**

EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS COM QUATRO TAMPAS EXTRAS LUER LOCK  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK COM DUAS TAMPAS EXTRAS  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK COM QUATRO TAMPAS EXTRAS  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK/SLIP  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK/SLIP COM DUAS TAMPAS EXTRAS  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER LOCK/SLIP COM QUATRO TAMPAS EXTRAS  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER SLIP  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER SLIP COM DUAS TAMPAS EXTRAS  
EXTENSOR MULTIVIAS COM QUATRO VIAS LUER SLIP COM QUATRO TAMPAS EXTRAS

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Inspeção visualmente o produto quanto a integridade da embalagem, anteriormente ao uso;
- 2- Abra a embalagem de modo asséptico;
- 3- Abra a(s) tampa(s) de acesso, conecte o dispositivo contendo a solução a ser infundida, retire o ar do sistema utilizando a própria solução.
- 4- Feche o(s) clamp(s) da(s) via(s);
- 5- Conecte o extensor ao dispositivo intravenoso, fixe-o de maneira adequada e confortável ao paciente;
- 6- Abra o(s) clamp(s) liberando o fluxo de infusão.
- 7- Após a utilização, e término da infusão, mantenha os tubos do extensor com solução apropriada, que evite refluxo sanguíneo e possível coagulação no sistema, feche o(s) clamp(s) e feche-o(s) com as tampas sobressalentes