

INSTRUÇÕES DE USO FIO DE AÇO COM AGULHA

Aço Com Agulha

R.M.S.: 10426020014

DESCRIÇÃO:

Suturas agulhadas, não absorvíveis, com fio de Aço, nos comprimentos variáveis de 2cm a 400cm e diâmetros de número cirúrgico variáveis (USP)12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A sua cor predominante é o metálico (Aço Cirúrgico).

INDICAÇÕES

A sutura de aço inoxidável está indicada para uso ortopédico, assim como naqueles procedimentos cirúrgicos que requerem um suporte artificial de alta resistência, como por exemplo, o fechamento de ferida do esterno. O uso do produto deverá estar de acordo com os procedimentos e técnicas aceitáveis utilizados para sutura não absorvível e levando em consideração o local da aplicação.

Aplica-se nas bordas das feridas cirúrgicas utilizando-se as técnicas de ponto a ponto ou continua seguindo as técnicas cirúrgicas de fechamento de incisões, conforme os critérios médicos.

CONTRA-INDICAÇÕES

As suturas de Aço não são indicadas para utilização em feridas com alto grau de contaminação microbiológica.

COMPONENTES ESSENCIAIS

É um fio de sutura não absorvível fabricado em de aço inoxidável tipo 316. Esta liga de aço contém: Ferro, Cromo, Níquel, Molibdênio, Carvão, Manganês e outros elementos que garantem uma liga de uso cirúrgico. Este monofilamento se caracteriza por sua fácil manipulação e uma dureza entre 80.000 e 90.000 lbs por polegada quadrada.

INSTRUÇÃO DE USO

O usuário, antes de utilizar este produto, deverá estar familiarizado com os procedimentos e técnicas cirúrgicas aplicáveis para a sutura não absorvível. Isto é importante devido o risco de deiscência da ferida e a formação de tecidos, dependendo do lugar da aplicação e do tipo e calibre da sutura utilizada.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;
- Conservar o produto em temperatura ambiente ($30 \pm 2^{\circ}\text{C}$), umidade relativa menor que 65% lugares secos e protegidos da luz solar;
- Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida;
- Uso exclusivo por profissionais de saúde devidamente habilitados no fechamento de tecidos em cirurgias;
- Artigo médico de uso único: não deve ser reesterilizado;
- Produto não fervível;
- Proibido Reprocessar;

- Produto esterilizado por raios gama (Cobalto 60) ou Gás de Óxido de Etileno (ETO).

APRESENTAÇÕES

As suturas Aço com Agulha estão disponíveis em cartuchos com 12, 24 ou 36 envelopes dependendo da apresentação.

ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE

Esterilizado por raios gama (Cobalto 60) ou Gás de Óxido de Etileno (ETO).

Válido por 05 anos a partir da data de fabricação, se mantida a integridade da embalagem.

Produto de uso único.

Não fervível.

Armazenar em ambiente seco e fresco, livre da luz solar direta e umidade.

Fabricante:

BIOLINE FIOS CIRÚRICOS LTDA

CNPJ 37844479/0001-52

Av. Maranhão nº 500 – Bairro Jundiáí

Anápolis/GO. CEP 75110-470

Fone: 55 (62) 3324-2120

contato@biolinefios.com.br

www.biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.M.S.: 10426020014

Responsável Técnico: Alexandre Faria Vasconcelos

CRQ XII 12200147