

## AGULHAS PARA ACUPUNTURA UNIQMED

### Indicação:

As Agulhas para Acupuntura são indicadas para realização de acupuntura por profissionais habilitados.

### Instruções de Uso:

Lave e seque as mãos antes de realizar o procedimento. Trabalhe sempre de acordo com a técnica de acupuntura recomendada e as normas de biossegurança:

- 1- Puxe delicadamente a ponta da embalagem para remover a agulha de forma asséptica;
- 3- Com uma mão, segure a agulha;
- 4- Posicione a outra mão no mandril (quando aplicável) e segure no local a ser inserido;
- 5- Manipule a agulha de acupuntura e deixe-a no local por tempo apropriado conforme técnica utilizada;
- 6- Retire a agulha;
- 7- Após o uso, fabricante recomenda o descarte da agulha em local apropriado conforme legislação vigente.

### Composição:

- Cabo em espiral e agulha: aço inoxidável 304
- Composição do aço inoxidável 304:
- Mandril (tubo guia): Plástico polipropileno

### Armazenamento e Conservação:

Conservar em ambiente limpo, seco e bem ventilado Não deve ser misturado com material virulento, perigoso ou corrosivo. Não expor à luz solar direta.

### Precauções:

- Atenção: Produto para uso profissional. Deve ser utilizado apenas por acupunturistas habilitados;
- Escolha o tamanho de agulha ideal para o paciente;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada ou danificada;
- Descartar em recipiente apropriado para perfuro – cortantes conforme legislação vigente;
- Fabricante recomenda uso único.

### Contra indicações:

Não aplicável

<b>Nome técnico:</b>	Agulha para Acupuntura			<b>Validade:</b>	05 anos
<b>Metodo de esterilização:</b> Esterilizado por óxido de etileno					
<b>Apresentação:</b>	Caixa com 50, 100, 200, 500, 1000 ou 2000 unidades, embaladas individualmente com 1, 5 ou 10 agulhas. Com ou sem mandril (tubo guia)				
<b>Modelo:</b>	<u>Diâmetros:</u> 0,10mm; 0,12mm; 0,13mm; 0,14mm; 0,15mm; 0,16mm; 0,18mm; 0,20 mm; 0,22mm; 0,24mm; 0,25mm; 0,26mm; 0,30mm; 0,32mm; 0,35mm; 0,38mm; 0,40mm; 0,45 mm; 0,72mm; 0,75mm; <u>Comprimentos:</u> 1mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,8mm; 2mm; 2,5mm; 2,8mm; 3mm; 5mm; 7mm; 8mm; 10mm; 13mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm; 35mm; 40mm; 45mm; 50mm; 60mm; 70mm; 75mm; 90mm; 100mm; 105mm; 120mm; 125mm; 135mm; 140mm; 150mm; 175mm.				
<b>ANVISA/MS:</b>	10098710064	<b>Classe de Risco:</b>	II	<b>Validade do Registro:</b>	Vigente
<b>Fabricante:</b>	Wuxi Jiajian Medical Instrument Co., Ltd				
<b>Origem:</b>	China				

Revisão.00

