

INSTRUÇÕES DE USO FIO DE CATGUT

Fio de CatGut Cromado
R.M.S.: 10426020007

DESCRIÇÃO:

Suturas produzidas com fio cirúrgico absorvível natural, multifilamentar, torcido e polido, nos comprimentos 30cm, 75cm, 90cm, 150cm e 250cm, com diâmetros que variam do número cirúrgico 2 a 6-0, de cor marrom.

INDICAÇÕES

O produto é utilizado para efetuar o fechamento de incisões cirúrgicas contribuindo com o processo de cicatrização dos tecidos. Indicado para suturas internas, cirurgias gastrointestinais, urológicas, amidalectomia circunscrição e fechamento geral

CONTRA-INDICAÇÕES

Não é indicado em procedimentos que necessitem de mínima reação tecidual, onde o tempo de cicatrização do tecido seja superior ao prazo de resistência tênsil do fio de sutura. Não é recomendado em procedimentos cardiovasculares e neurológicos.

QUANDO APLICÁVEL, A PALAVRA “ESTÉRIL”

Estéril

COMPONENTES ESSENCIAIS:

Fio: fibras de colágeno oriundo do intestino delgado bovinos, tratadas com, secas e torcidas.

Agulha: aço inoxidável AISI 420 com revestimento siliconizado, de diversos tamanhos, curvaturas e bisel, encastoadas em uma das extremidades do fio cirúrgico.

Solução Amaciante: Isopropanol (90%), Benzoato de Sódio (0,5%), Dietanolamina (1,0%), água deionizada (8,5%).

INSTRUÇÃO DE USO

Aplica-se nas bordas das incisões cirúrgicas, utilizando as técnicas segundo critério médico.

Cuidado na Aplicação: Tencionar antes de usar, não esmagar ou deformar o fio de sutura ao utilizar o porta-agulhas.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

É recomendado que ao manusear este ou qualquer outro material de sutura, tome-se o cuidado para evitar danos de manuseio. Evitar amassar ou enrugar ao usar junto com instrumentos cirúrgicos, tais como pinças ou porta-agulhas.

Como qualquer material de sutura, a garantia de nós adequados requer técnicas cirúrgicas aceitáveis de laços simples e duplos, com laçadas adicionais asseguradas pelas circunstâncias cirúrgicas e pela experiência do cirurgião.

Recomenda-se que a embalagem seja aberta imediatamente antes do uso para minimizar a possibilidade de contaminação, tomar cuidado para que seja feito sempre de modo asséptico.

A Sutura de CatGut Cromado não deve ser utilizada após seu prazo de validade.

O envelope transparente (grau cirúrgico – interno) garante a esterilidade do produto, desde que não aberto ou danificado.

Estas embalagens não devem ser autoclavadas.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada;

Conservar o produto em temperatura ambiente (30°C +/- 2°C), umidade relativa menor que 65%, lugares seco e fresco, livre de luz solar direta e umidade;

Uso exclusivo por médicos no fechamento de tecidos em cirurgias;
Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único.
Produto não fervível;
Proibido reprocessar;

APRESENTAÇÕES

A sutura cirúrgica CatGut Cromado está disponível na seguinte apresentação:
Cartuchos contendo 12 ou 24 unidades de acordo com o produto.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO

Considerando.

DESCARTE DO PRODUTO

Risco de Contaminação biológica. Adote procedimentos internos de descarte, levando em conta o risco de contaminação.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar o produto a uma temperatura em torno de 30°C variação de mais ou menos 2°C, com umidade em torno de 65% e ao abrigo da luz direta.

ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE

Produto esterilizado a uma dose de 20 KGY de raio Gama (Cobalto 60).
Válido por 05 anos a partir da data de fabricação, se mantida a integridade da embalagem.

Fabricante:

BIOLINE FIOS CIRÚRICOS LTDA

CNPJ 37844479/0001-52

Av. Maranhão nº 500 – Bairro Jundiáí

Anápolis/GO. CEP 75110-470

Fone: 55 (62) 3324-2120

contato@biolinefios.com.br

www.biolinefios.com.br

Indústria Brasileira

R.M.S.: 10426020007

Responsável Técnico: Alexandre Faria Vasconcelos

CRQ XII 12200147

Distribuído por:

LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A. | Aesculap

Av. Eugênio Borges, 1092, Arsenal | São Gonçalo | RJ | 24751-000

CNPJ. 31.673.254/0001-02 | Industria Brasileira.

Aesculap –a B.Braun Company