

# Descrição

## Apresentação

O Avental Cirúrgico Estéril Descartável Manga Longa é indicado em procedimentos cirúrgicos de curta ou longa duração, com liberação de pequenos volumes de sangue ou fluidos corpóreos.

Com dupla embalagem, possui TAG de transferência asséptica para fechamento/ajuste de viés de cintura;

Soldado por ultrassom em áreas de junção de não tecido, garantindo proteção contra agentes contaminantes. Possui manga longa, punho de malha.

**OBS: Acompanhado de toalha absorvente de não tecido spunlace (40cm x 50cm)**

## Benefícios

- Dupla embalagem: embalado em papel grau cirúrgico e invólucro que garante perfeita condição estéril;
- Fabricado em SMS de alta qualidade, com certificação de origem;
- Solda por ultrassom: costura precisa que assegura a proteção contra agentes contaminantes;
- Manga Ranglan Anatômica: além de confortável, proporciona segurança efetiva;
- Custo-benefício certificado.

## Modo de Uso

1. Abrir a embalagem de papel grau cirúrgico somente no momento do seu uso;
2. Retirar o lacre adesivo do envoltório de não tecido e expor o avental cirúrgico e a toalha absorvente, com técnicas assépticas;
3. Utilizar a toalha absorvente para a secagem de mãos e descartá-la logo após seu uso;
4. Deve-se vestir o avental cirúrgico introduzindo, com um só movimento, os antebraços e braços pela manga do avental;
5. Ajustar o fecho “hook and loop” e tiras de cintura, a fim de garantir conforto ao usuário; Deve-se descartar o avental cirúrgico;

**“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”;**

## Especificações Técnicas

- Atóxico
- Uso único;
- Estéril;

- Descartável;
- Apirogénico;
- Hipoalergênico;
- Fechamento “Hook and Loop”;
- Soldado por ultrassom em áreas de junção de não tecido;
- Com mangas longas que possuem terminação nos punhos de malha;
- Material: tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno SMS;
- Gramatura: 40g/m<sup>2</sup>;
- Cor: Azul hospitalar;
- Tamanho: G (1,50mx1,20m), EG (1,70mx 1,35m);
- Validade: 3 anos após a data de esterilização;
- Embalagem: Uma unidade;
- Dimensões embalagem: (40cm(c) x 25cm(l) x 5cm(a));
- Peso embalagem: G (135g), EG (155g);
- ANVISA: 82443150001.