



CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO VITAL GOLD

REGISTRO ANVISA 10296900163

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - De acordo com a análise feita pelo médico responsável é selecionado o tamanho (numero) da cânula mais conveniente.
- 2 - Inspeção visualmente o produto quanto à integridade da embalagem, anteriormente ao uso;
- 3 - Abra a embalagem de forma asséptica;
- 4 - Realizar teste prévio de insuflamento do balão, desinsuflado o antes do uso.
- 5 - Ao inserir a cânula de traqueostomia proceda conforme técnica médica atualmente aceita;
- 6 - Insufle o balão de acordo com o mínimo de volume necessário para proporcionar ventilação adequada;
- 7 - Para a extubação siga as técnicas médicas atualmente aceitas e desinfele o balão.

IMPORTANTE: A avaliação, decisão e manuseio do produto em caso de substituição deverão ser feitos exclusivamente pelo médico responsável pelo paciente.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Abrir a embalagem de forma asséptica

Artigo médico-hospitalar de uso único.

Destruir após a sua utilização.

Ler as instruções antes de usar.

Não deverá ser reprocessado ou reaproveitado sob hipótese alguma.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.

O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

A avaliação, decisão e manuseio do produto deveram ser feito exclusivamente por médico devidamente habilitado



As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado na utilização em pacientes conscientes, pois poderá causar indução a êmese.

Contraindicado em pacientes que sofram de edema de laringe e/ou ferimento de vértebra cervical e/ou tórax que oprima a traqueia.

Inflamação de traquéia.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

