

CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA (RTI)

REGISTRO MS: 10150470557

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: ADAPTADORES
Matéria Prima: ABS E BORRACHA DE POLISOPRENO
Produto Estéril: (X) Sim () Não
Método de Esterilização: Óxido de Etileno
Validade: 5 Anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo anexado a conjuntos de infusão / transfusão para adicionar medicamentos, realizar salinizações, e após o uso mantém barreira de fechamento evitando contato com o meio externo.

INDICAÇÃO DE USO

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo indicado para o uso em conjuntos de infusão/ transfusão e cateteres intravenosos periféricos e centrais que se destinam à manutenção da permeabilidade da infusão intravenosa.

INSTRUÇÃO DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica.
- Certifique-se de que a tampa não toque a superfície externa da embalagem.
- Realize antissepsia na ponta do dispositivo a ser utilizado e conecte o adaptador. Quando conectar gire cerca de 2-3 vezes até que a conexão esteja firme o suficiente.
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

Nota: Realizar antissepsia na ponta do dispositivo antes e depois do uso.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GC6029T02	CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA CX100UN (RTI)

FOTO**Tampa Luer com Membrana**

Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica, **MANTENDO O SISTEMA FECHADO.**

LIVRE DE LÁTEX**ESTÉRIL**CAIXA COM
100
UNIDADES***ISENTO DE LÁTEX****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Comprimento: 17.8 ±0.4 mm
- Diâmetro Ø: 10.3 ±0.3mm
- Conexão: Luer

COMPOSIÇÃO

- Plug: ABS
- Membrana: Borracha de Polisopreno
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é fornecido esterilizado a óxido de etileno, embalado unitariamente em blister flexível de polietileno e papel grau cirúrgico em caixas contendo 100 unidades.

DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FARMACÊUTICA- LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 39.887.396/0001-76

Site: www.royaltechhospitalar.com.br

SAC (41) 99740-5140/3011-5509

E-mail: royaltech.hospitalar@gmail.com

Resp. Téc.: LEOPOLDO FONTES CRF-PR 27.434