

NOME DO PRODUTO: EQUIPO MICRO BURETA 150 ML WILTEX

Registro MS: 10150470553

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Equipo

Nome Comercial: EQUIPO MICRO BURETA 150 ML WILTEX

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril : Sim

Validade: 05 Anos

USO ÚNICO.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Composto por Bureta em PVC, flexível, graduada de 150ml, transparente com uma faixa branca na parte posterior da bureta uma câmara de gotejamento em PVC transparente com filtro de fluído, controlador de fluxo tipo pinça rolete corta fluxo. Extensão em PVC com 1.60cm de comprimento, com injetor lateral (Y) e conector luer lock. Entrada de ar com filtro hidrófobo, com membrana autocicatrizante. Dispositivo ABC com micro gotejamento.

Marca de graduação na cor azul: de 0 a 150ml em intervalos de 10ml; Lanceta perfurante e alça de sustentação em PVC com entrada de ar.

INDICAÇÃO DE USO

Dispositivo indicado para infusão de soluções parenterais para uso gravitacional, geralmente usado em conjunto com cateter intravenoso.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Abrir a embalagem de forma asséptica;
2. Retirar o equipo do invólucro protetor;
3. Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
4. Introduzir a ponta perfurante do equipo no frasco/ampola;
5. Fechar o controlador de fluxo;
6. Pendurar o frasco / ampola no suporte, preencher a câmara de gotejamento, abrir o controlador de fluxo e realizar o preenchimento do tubo; caso de equipo com respiro de ar, o mesmo deve permanecer fechado após o preenchimento da câmara de gotejamento.
7. Após preenchido o tubo, fechar o regulador de fluxo, conectar a extremidade distal no cateter do paciente e então regular o fluxo conforme a prescrição médica. Se possuir respiro de ar, o mesmo deverá ser aberto para infusão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Com filtro de fluido.

Conexão: Luer Lock

Comprimento: 1900mm \pm 10mm

Volume bureta: 150ml

FOTO

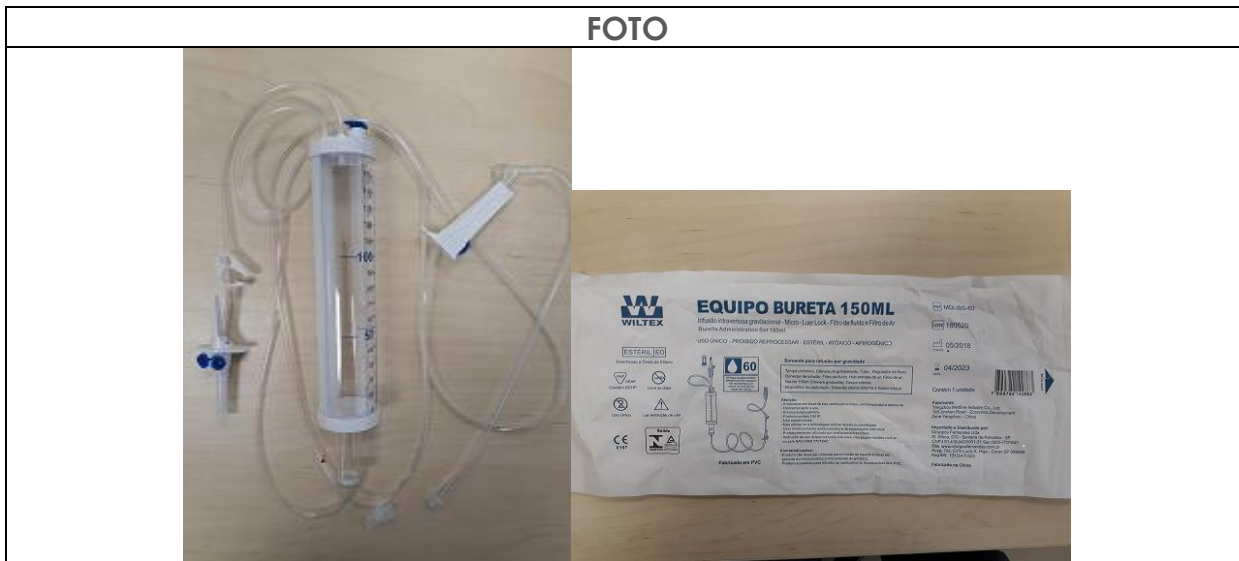

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Código	Descrição
MDLIBS-60	EQUIPO MICRO BURETA 150 ML

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica (em pétala).

Embalagem com 100 unidades.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e arejado.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Somente para infusão por gravidade

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259