




- 10 cm x 10 cm
- Estéril por Óxido de Etileno
- Cadastro Anvisa nº: 80003300029
- Validade: 05 anos

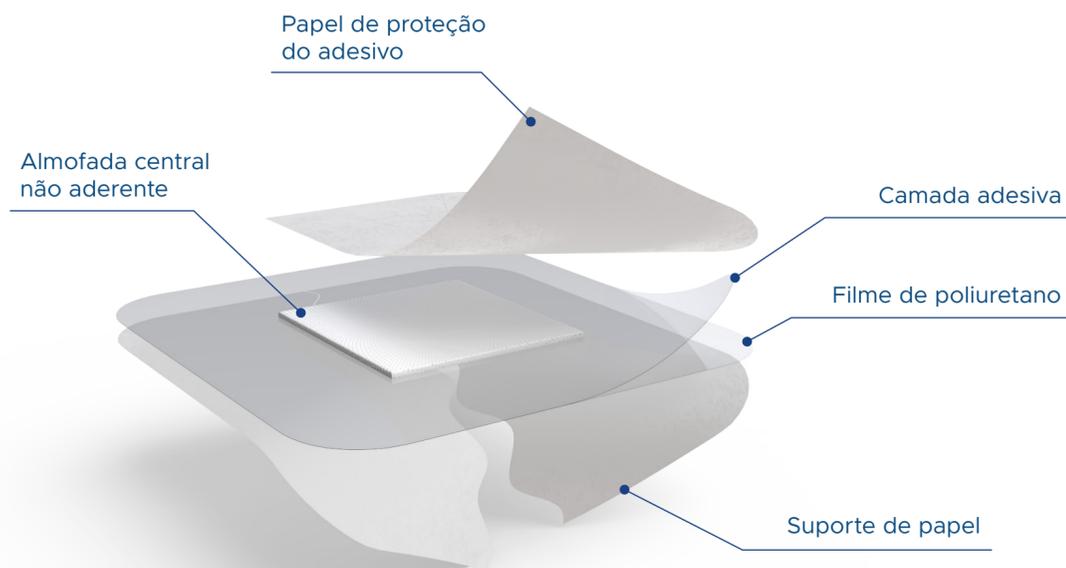

CURATIVO DE FILME DE POLIURETANO (PU) com adesivo hipoalergênico e uma almofada absorvente central, protegidos por um papel siliconizado. Reduz risco de infecção por prevenir acúmulo de umidade. O filme de poliuretano M-TEC possui alta permeabilidade aos vapores de água, prevenindo o acúmulo de umidade embaixo do curativo, reduzindo o crescimento bacteriano e o risco de infecção relacionado ao cateter.

- Super fino e transparente;
- Almofada Absorvente;
- Fixação de Curativos Primários ou de baixa aderência;
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus;
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele;
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção;
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio;
- Macio e adaptável.

COMPOSIÇÃO

Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, uma almofada central não aderente de não tecido de viscosa, protegidos por um papel siliconizado.

O curativo possui na parte externa uma camada de papel que atua como um sistema de fácil aplicação do filme (retirado assim que o curativo é aplicado). Isento de látex.

INDICAÇÃO

Indicado como curativo primário apenas para absorção e proteção de feridas de baixa a moderada exsudação ou cortes pequenos, ou abrasões. Pode ser usado também como curativo pós operatório para proteção de incisões cirúrgicas.

APRESENTAÇÕES / EMBALAGEM

O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	REGISTRO ANVISA	EAN
PA.1381	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm	8 caixas com 100 un	80003300029	7896544902718
PA.1418	Curativo de PU Absorvente 10cm x 10cm	Caixa com 100 un	80003300029	7896544902718

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E MODO DE USO

Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 0°C e 40°C. Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. Cadastro Anvisa nº: 80003300029. Validade: 05 anos.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Prepare o local de aplicação do produto, realizando desbridamento, tricotomia e limpeza, conforme instruções do protocolo da instituição;
- 2) Escolha o tamanho adequado para o procedimento a ser realizado;
- 3) Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
- 4) Remova a película protetora sobre o visor do curativo;
- 5) Remova a película protetora da face adesiva do curativo;
- 6) Aplique o curativo sobre o local desejado, fazendo visualização por meio do visor, certifique-se de não estar esticando o curativo durante a aplicação;
- 7) Faça a remoção da última película protetora sobre a face adesiva do curativo;
- 8) Remova as bordas do curativo, fazendo leve pressão do centro às bordas o curativo, a fim de garantir total fixação do mesmo.

