

## **KIT CIRURGIA TNT SMS 40G (RTI)**

### **REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN N° 37 de 08/09/1999.

### **PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**

### **DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: KIT CIRURGIA VETERINÁRIA ESTÉRIL AZUL SMS PP40

Matéria Prima: AVENTAL: 100 % POLIPROPILENO

CAMPO : 100 % POLIPROPILENO

TOALHA: 100 % VISCOSE

Produto Estéril: ( X ) Sim ( ) Não

Validade: 2 Anos

### **FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

### **DESCRIÇÃO**

Kits veterinários de aplicação em cirurgias com itens fabricados 100% em polipropileno SMS em PP40, prontos para o uso. Disponível em confecção de campos cirúrgicos com dupla característica (impermeável + absorvente). O lado absorvente suga os líquidos que respingam sobre o campo, evitando que escorram e molhem piso do ambiente cirúrgico, e o impermeável evita a contaminação do campo pela superfície do mobiliário. Caso contrário, após a absorção de líquidos pela sua camada superior, a região umedecida se tornaria ponte para passagem de agentes contaminantes. Produto sempre embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por ETO.

### **INDICAÇÃO DE USO**

Indicado o uso em procedimentos cirúrgicos, de baixa ou alta complexidade, fornecendo a proteção para o profissional, paciente e ambiente cirúrgico.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- Abrir a embalagem em papel grau cirúrgico.
- Abrir a embalagem em wrap confeccionado em não tecido SMS.
- Coloque a mão direita na dobra em direção a manga do avental e levante-o.
- Com a mão esquerda dentro do avental, comece a abri-lo.
- Ajuste o avental nas mangas e ombros.
- Ajuste as mangas e ombros do avental. Amarrar as tiras internas do avental.
- Segure o TAG com a mão direita e remover uma tira com a esquerda.
- Entregue o TAG ao assistente, que o devolverá após o transpasse pelas costas. Puxe a tira longa do cartão que o assistente segura e amarre as tiras, garantindo o fechamento.
- Os campos devem ser estendidos sobre as superfícies ou tecidos (paciente) a serem protegidos antes de iniciar o procedimento.
- Sua remoção deve ser imediata ao término da sessão, sendo descartado no lixo adequado, dependendo da contaminação ocorrida durante o procedimento.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
046.00.0029	KIT CIRURGIA SMS 40G (01) VETERINÁRIO (G) 1UN (RTI)
046.00.0030	KIT CIRURGIA SMS 40G (01) VETERINÁRIO (EGG) 1UN (RTI)
046.00.0031	KIT CIRURGIA SMS 40G (02) VETERINÁRIO (G) 1UN (RTI)
046.00.0032	KIT CIRURGIA SMS 40G (02) VETERINÁRIO (EGG) 1UN (RTI)

## FOTO COMPOSIÇÃO KIT (01):



KIT CIRURGIA SMS 40G (01) VETERINÁRIO  
(G) 1UN (RTI) – COD:046.00.0029



KIT CIRURGIA SMS 40G (01) VETERINÁRIO  
(EGG) 1UN (RTI) – COD:046.00.0030

- 01 Avental cirúrgico manga longa SMS PP40 Azul
- 01 Campo cirúrgico SMS PP40 0,60 X 1,00M Azul
- 01 Campo cirúrgico SMS PP40 1,00 X 1,20M Azul
  - 01 Toalha 100% Viscose

## FOTO COMPOSIÇÃO KIT (02):



KIT CIRURGIA SMS 40G (02) VETERINÁRIO  
(G) 1UN (RTI) – COD:046.00.0031



KIT CIRURGIA SMS 40G (02) VETERINÁRIO  
(EGG) 1UN (RTI) – COD:046.00.0032

- 02 Aventais cirúrgicos manga longa SMS PP40 Azul
- 01 Campo cirúrgico SMS PP40 0,60 X 1,00M Azul
- 01 Campo cirúrgico SMS PP40 1,00 X 1,20M Azul
  - 02 Toalhas 100% Viscose

**\*ISENTO DE LÁTEX**

**COMPOSIÇÃO**

- AVENTAL: 100% Polipropileno
- CAMPOS: 100% Polipropileno
- TOALHA: 100% Viscose
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

**ARMAZENAGEM**

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

Embalagem de papel grau cirúrgico contendo 1 kit.

**DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051