

**NOME DO PRODUTO: SONDA EM T OU DRENO DE SUCÇÃO EM LATEX KEHR
– FOYOMED**

Registro MS: 10150470506

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: Latex

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A Sonda em T Kerh em Látex ou dreno de sucção KEHR – Foyomed é composto de Látex.

INDICAÇÃO DE USO

O Dreno de Sucção Capilar em T (Kehr) em Látex Foyomed é indicado para drenagem de fluídos após cirurgia clínica ou hidropisia, pneumatose, pus e sangue de feridas de pacientes.

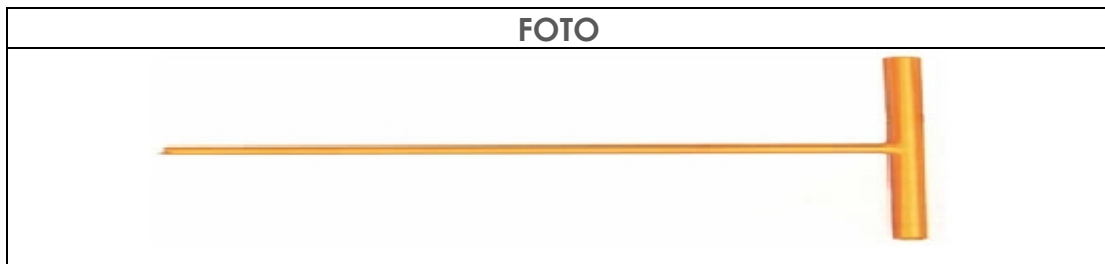
INSTRUÇÃO DE USO

- Escolher o tamanho adequado da Sonda em T (Kehr);
- Retirar de sua embalagem, em condições assépticas;

- A sonda é colocada durante o ato cirúrgico (ainda com a cavidade aberta) e retirada quando cessar a drenagem;
- Para sua retirada, utilizam-se movimentos que são chamados de tração, até sua retirada total;
- Para permitir a saída dos fluídos, a sonda é envolvida por uma bolsa de drenagem que é aderida à pele impedindo o vazamento de secreções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanhos variados que vão de 8FR até 24FR

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO
FY011008	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	08FR x 15cm x 30cm
FY011010	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	10FR x 15cm x 30cm
FY011012	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	12FR x 15cm x 30cm
FY011014	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	14FR x 15cm x 30cm
FY011016	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	16FR x 15cm x 30cm
FY011018	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	18FR x 15cm x 30cm
FY011020	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	20FR x 15cm x 30cm
FY011022	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	22FR x 15cm x 30cm
FY011024	Dreno de Sucção Kehr Em látex - Foyomed	24FR x 15cm x 30cm

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Envelope termoselado com face grau cirúrgico

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local limpo e temperatura ambiente

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Produto de uso único, descarta após o uso;
 - Esse produto contém látex de borracha natural e seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
 - Proibido reprocessar,
- O tempo máximo de permanência do produto no paciente é de 29 dias.**

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259