



## SONDA DE FOLLEY EM LATEX VITALGOLD

**REGISTRO ANVISA 10296900173**

### **INSTRUÇÕES DE USO**

- 1 - Lave bem as mãos e utilize luva descartável.
- 2 - Escolha o calibre da sonda adequado ao paciente e a necessidade pretendida;
- 3 - A partir das técnicas de sondagem atualmente aceitas, proceda com assepsia da região genital e uretral;
- 4 - Todo procedimento deverá ser realizado de modo a preservar a esterilidade do produto e dos materiais que serão utilizados;
- 5 - Abra a embalagem de forma asséptica;
- 6 - Teste o funcionamento mecânico da sonda, injetando ar de acordo com a capacidade do balonete, indicado na embalagem;
- 7 - Não utilize o produto caso observado qualquer tipo de vazamento valvular e ou do balonete;
- 8 - Esvazie o balonete
- 9 - Lubrifique a ponta da sonda com anestésico estéril á base de água;
- 10- Introduza a sonda através da uretra até perceber o refluxo de urina, caso haja ardência além dos limites normais ou sangramento, interrompa a sondagem e solicite avaliação médica;
- 11- Insufle o balonete com água destilada, utilizando o volume de água conforme indicado na embalagem e tracione a sonda lentamente ate perceber a resistência do esfíncter uretral;
- 12- Fixe a sonda conforme técnica aceita e conecte-a um sistema de drenagem;
- 13- Para retirada desinsufle o balonete lentamente e retire a sonda.
- 14 - Descarte o material em local apropriado

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Artigo médico hospitalar - uso único

Produto estéril – Esterilizado a Oxido de Etileno



A embalagem deve ser aberta somente no momento da sua utilização em condições assépticas.

Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora do prazo de validade;

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados;

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Não recomendado a utilização da sonda de foley uretral em um período superior a 7 dias

Não utilizar pomadas ou lubrificantes à base de petróleo;

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Pacientes hipersensíveis ao látex não devem utilizar o produto, com risco de reação alérgica grave.

Contra indicado a paciente com trauma uretral;

Pacientes que apresentem sangramento no meato urinário;

Abcessos de próstata ou retal;

### **ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joaomed.com.br](http://www.joaomed.com.br)

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

**IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO**

