



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A.

TAMPA OCLUSORA VITAL GOLD

REGISTRO ANVISA 10296900130

MODELOS

TAMPA LUER LOCK / LUER SLIP VITAL GOLD

TAMPA LUER LOCK VITAL GOLD

TAMPA LUER SLIP VITAL GOLD

TAMPA VALVULADA VITAL GOLD

INSTRUÇÕES DE USO

- 1-Escolha o modelo da tampa e a necessidade pretendida;
- 2- O produto deve ser manipulado com as mãos limpas,
- 3-Inspeccione a embalagem se está devidamente selada e dentro do prazo de validade,
- 4-Gire em sentido horário até sentir que a tampa está devidamente encaixada e firme,
- 5-Verifique se ficou bem selada e sem vazamento,
- 6-Descartar conforme rotina normal de cada instituição de saúde.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Respeitar o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor (temperatura ideal 10° a 40°) e da luz e mantendo em local fresco e seco (umidade ideal de 20 – 80%). Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR


JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br


Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO


TAMPA LUER LOCK / LUER SLIP VITAL GOLD - Veda o sistema de infusão com terminal macho como seringas, equipos, torneirinhas machas e o o sistema de infusão com terminal fêmea como cateter, scalp, multivias, infusores e torneirinhas fêmea.

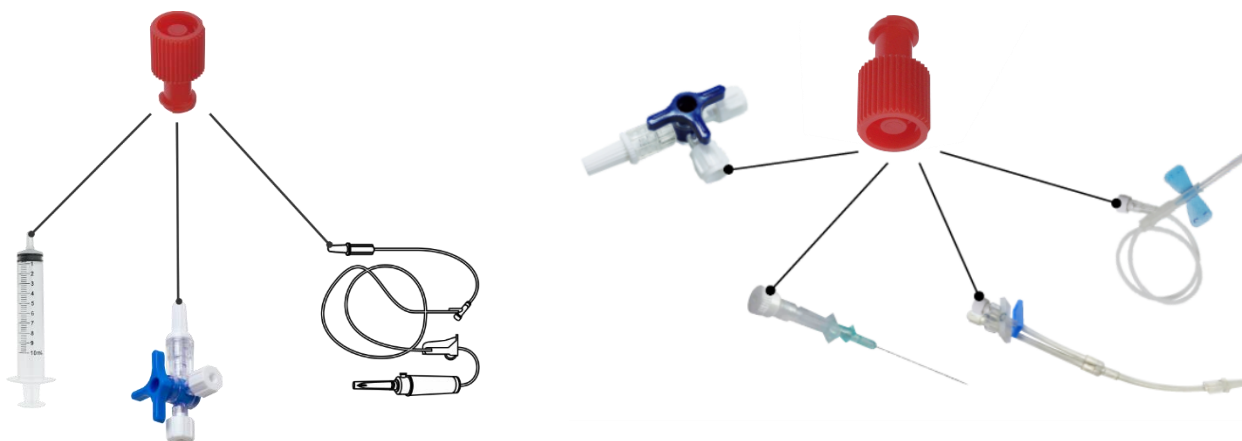

TAMPA LUER LOCK VITAL GOLD - Veda o sistema de infusão com terminal fêmea como cateter, scalp, multivias, infusores e torneirinhas fêmea.

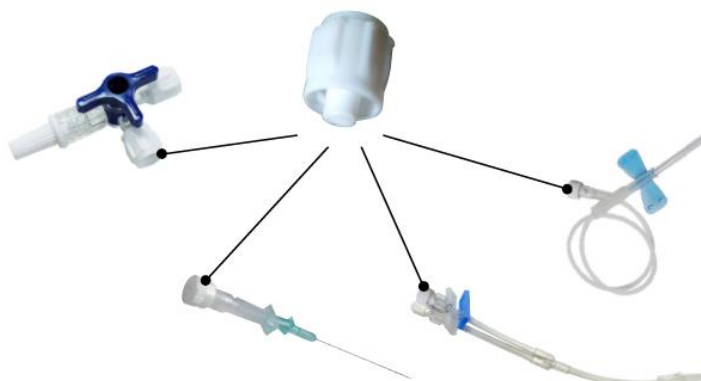

TAMPA LUER SLIP VITAL GOLD - Veda o sistema de infusão com terminal macho como seringas, equipos, torneirinhas machas

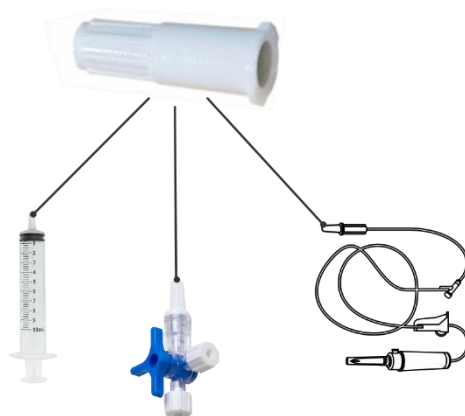

TAMPA VALVULADA VITAL GOLD – Veda o sistema de infusão com terminal fêmea como cateter, scalp, multivias, infusores e torneirinhas fêmea.

