



NOME DO PRODUTO: SERINGA HIPODÉRMICA DE 50ML PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO - KDL

Registro MS: 10150479110

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Seringas Descartáveis

Matéria Prima: Polipropileno

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (X)Sim ()Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A seringa hipodérmica estéril de uso único para uso em bomba KDL é composta por polipropileno e com bico luer lock, graduada a cada 1 ml com capacidade nominal de 50 ml e real de 60 ml.

Fornecida esterilizada a óxido de etileno em embalagem individual.

INDICAÇÃO DE USO

A Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso em bomba KDL é usada em conjunto com uma bomba de seringa motorizada, que é usada para injetar e administrar drogas após o bombeamento do líquido.

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br

INSTRUÇÃO DE USO



INSTRUÇÃO DE USO

- Escolher a seringa adequada, de acordo com a utilização pretendida;
- Verificar se a embalagem esta integra e certificar-se de que os produtos estão dentro do prazo de validade;
- Abrir a embalagem de forma asséptica;
- Depois de extrair o medicamento com uma seringa, conecte a seringa ao tubo de extensão ou cateter;
- Após esgotar o ar do sistema, fixe a seringa no equipamento;
- Usado em conjunto com uma bomba de seringa para injetar medicamentos líquidos;
- Após o uso, descarte a seringa de acordo com as normas do hospital ou do país.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Componentes Corpo do embolo Embolo Ponta do embolo Matéria Prima Polipropileno Polipropileno Borracha de polyisoprene

FOTO	
LOS SIMOTE DE KOST (1111)	

^{*} Isento de Látex e DEHP – graduação a cada 1 ml

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br



APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
KS60S-LLP	Seringa Hipodérmica 50mL para uso em bomba de infusão

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embaladas unitariamente em Papel Grau Cirúrgico.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar e transportar em local seco e limpo.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Produto de uso único, descartar após o uso;
- Proibido reprocessar;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar o produto fora da data de validade;
- Utilizar imediatamente quando a embalagem individual estiver aberta.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259

SAC: 0800-771647 | E-mail: produtos@cfernandes.com.br