

**NOME DO PRODUTO: FILME TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL EM ROLO
PHARMAFIX® - PHARMAPLAST**

Registro MS: 10150470696

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Curativo

Matéria Prima: Poliuretano / Não tecido

Método de Esterilização:

Produto Estéril: () Sim (X) Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Filme Transparente Não Estéril em rolo Pharmafix® da Pharmaplast é fabricado em poliuretano permeável a gases e impermeável à água que deve ser aderido à pele para promover a fixação de cateteres ou curativos, proteção de feridas, barreira contra bactérias e água, sem provocar dor no momento de sua retirada.

INDICAÇÃO DE USO

O Filme Transparente Não Estéril em Rolo Pharmafix® é indicado para fixação e retenção de curativos, compressas, cateteres, tubos de drenagem, etc.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Certifique-se de que a pele esteja seca e limpa antes da aplicação.
2. Corte a fita no comprimento necessário. O comprimento da fita deve se estender pelo menos meia polegada além do curativo.
3. Aplique a fita e para promover a saúde da pele, não estique ou aplique com tensão sobre as áreas onde a fita ficará aderida diretamente à pele.
4. Alise a fita com a ponta dos dedos para garantir uma boa adesão.
5. Para os modelos em poliuretano devem ser observados adicionalmente os seguintes cuidados:
6. Remova o início da aba inferior do revestimento de liberação para expor a superfície adesiva.
7. Aplique a fita enquanto remove o resto da aba inferior ao mesmo tempo. Não estique o filme durante a aplicação.
8. Remova a camada superior de dois suportes com pétala.
9. Alise o filme com a ponta dos dedos para garantir uma boa adesão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASFilme Transparente Não Estéril em Rolo Pharmafix®

Base - Não tecido

Adesivo - Adesivo curável por UV / adesivo hot melt / adesivo acrílico à base de água

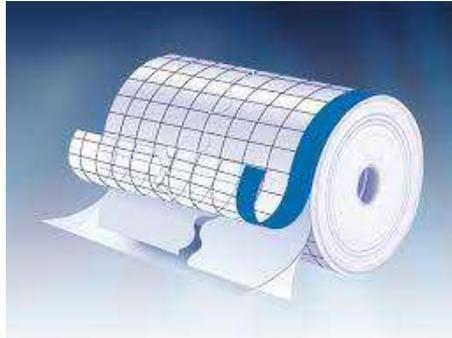
Suporte - Papel artesanal revestido de argila

Filme Transparente Não Estéril em Rolo Pharmafix® PU

Base - Filme de Poliuretano

Adesivo - Adesivo curável por UV / adesivo acrílico

Suporte - Papel artesanal revestido de argila / Filme de polietileno siliconizado.

FOTO

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	MATERIA
FIX254550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx4.55m	Não tecido
FIX504550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx4.55m	Não tecido
FIX754550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx4.55m	Não tecido
FIX1004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx4.55m	Não tecido
FIX1504550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx4.55m	Não tecido
FIX2004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx4.55m	Não tecido
FIX3004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx4.55m	Não tecido
FIX255000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx5m	Não tecido
FIX505000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx5m	Não tecido
FIX755000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx5m	Não tecido
FIX1005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx5m	Não tecido
FIX1505000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx5m	Não tecido
FIX2005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx5m	Não tecido
FIX3005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx5m	Não tecido

FIX259140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx9.14m	Não tecido
FIX509140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx9.14m	Não tecido
FIX759140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx9.14m	Não tecido
FIX1009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx9.14m	Não tecido
FIX1509140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx9.14m	Não tecido
FIX2009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx9.14m	Não tecido
FIX3009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx9.14m	Não tecido
FIX2510000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx10m	Não tecido
FIX5010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx10m	Não tecido
FIX7510000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx10m	Não tecido
FIX10010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx10m	Não tecido
FIX15010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx10m	Não tecido
FIX20010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx10m	Não tecido
FIX20150	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2 cmx 15 cm	Não tecido
FIX30010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx10m	Não tecido
FIX1805000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	18 cm x 5m	Não tecido
FIXPU254550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU504550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU754550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU1004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU1504550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU2004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx4.55m	Poliuretano

FIXPU3004550	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx4.55m	Poliuretano
FIXPU255000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx5m	Poliuretano
FIXPU505000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx5m	Poliuretano
FIXPU755000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx5m	Poliuretano
FIXPU1005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx5m	Poliuretano
FIXPU1505000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx5m	Poliuretano
FIXPU2005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx5m	Poliuretano
FIXPU3005000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx5m	Poliuretano
FIXPU259140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU509140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU759140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU1009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU1509140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU2009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU3009140	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx9.14m	Poliuretano
FIXPU2510000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	2.5cmx10m	Poliuretano
FIXPU5010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	5cmx10m	Poliuretano
FIXPU7510000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	7.5cmx10m	Poliuretano
FIXPU10010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	10cmx10m	Poliuretano
FIXPU15010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	15cmx10m	Poliuretano
FIXPU20010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	20cmx10m	Poliuretano
FIXPU30010000	Filme Transparente em Rolo Pharmafix®	30cmx10m	Poliuretano

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O produto é fornecido em rolos, com suporte interno em polietileno.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Nenhum requisito especial. Recomenda-se armazenar < 35° C em condições secas.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Recomendado uso por até 8 dias;

Trocar o curativo quando este ficar sujo, perder a aderência ou ao trocar os cateteres;

Suspender o uso do curativo se sintomas coceiras ou erupções de pele ocorrerem.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259