

SERINGAS DE GASOMETRIA NEOLAB

INSTRUÇÕES DE USO

Uso pretendido: Seringa estéril, atóxica e apirogênia para uso na coleta de sangue arterial para gasometria, utilizadas para testes de cálculo da pressão parcial de gases como o oxigênio e o dióxido de carbono no sangue, bem como a determinação do pH sanguíneo e os valores de bicarbonato e saturação de oxigênio no sangue. Deve ser utilizada exclusivamente para a coleta de sangue. **NÃO UTILIZAR PARA INJEÇÃO.** Somente para diagnóstico *in vitro*.

Armazenamento e Estabilidade: Armazenar em temperatura ambiente, abaixo de 25°C. Válido por 2 anos após a data de fabricação.

Precauções e Avisos: Manusear com cuidado. Vermelhidão e inchaço podem ocorrer no local da injeção. Normalmente, punções arteriais são dolorosas, mesmo se um anestésico local for utilizado. O paciente pode sentir desconforto ou dor após o procedimento. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual adequados. Produto esterilizado por óxido de etileno. Contém látex.

Contraindicações: Não deve ser utilizada em pacientes com hipersensibilidade aos materiais do produto.

Modo de uso:

Atenção: A coleta de amostras de sangue arterial só deve ser realizada por profissional de saúde capacitado.

1. Realize o preparo do paciente de acordo com seu procedimento padrão.
2. Certifique-se de a embalagem não esteja rasgada ou danificada.
3. Abra a embalagem e retire a seringa.
4. Puxe o êmbolo até a posição adequada.
5. Insira a agulha no local escolhido para a punção.
6. Colete a amostra.
7. Homegeinizar por 20-30 segundos, retirar bolhas e tampar.
8. Utilizar ou armazenar a amostra imediatamente.

Atenção: Produto estéril de uso único. Não reutilizar.

Fabricado por:

BERİKA TECHNOLOGY MANUFACTURING IMPORT EXPORT TRADE LTD. STI.
Alakova Neighborhood Karaman Street No:812 MERAM-KONYA-TURKEY
Telephone: (+90) 332 238 99 98
Fax: (+90) 332 237 99 81
www.berikamedikal.com.tr office@berikamedikal.com.tr

Importado por:

All Lab Comercial Ltda – EPP
Rua Carlos Gusso, 250, Águas Belas - São José dos Pinhais/PR – Brasil, CEP 83.040-630
CNPJ: 19.880.964/0001-08
Telefone: +55-41-31460802
E-mail: neolabimport@neolabimport.com.br
Resp. Téc.: Graciele Boscatto – CRF/PR: 19208
Registro MS: 81140320022

Símbolos utilizados:



Número do lote



Número no catálogo



Data de validade



Esterilizado por óxido de etileno



Armazenar até 25°C



Contém látex



Não reutilizar