

**NOME DO PRODUTO: CATETER IV PERIFÉRICO JELCO SERIVA PUR – SMITHS
MEDICAL**

Registro MS: 80228990148

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Cateter

Matéria Prima: Poliuretano

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

USO ÚNICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Cateteres IV Periféricos Jelco Seriva - PUR fornecem um acesso a uma veia periférica por punção da pele e veia do paciente. A agulha / cânula é descartado após a inserção, cateter permanece no local dentro da veia do paciente para a administração de fluidos intravenosos, retirada de amostras de sangue e administração de fluidos e medicamentos intravenosos na circulação do paciente. colorido conforme os tamanhos da cânula, com câmara retrospectiva flashback- [Flash- Vue®], câmara de refluxo transparente, filtro hidrofóbico, atóxico e apirogênico.

INDICAÇÃO DE USO

Os Cateteres IV Periféricos Jelco Seriva - PUR comumente conhecidos como Cânula Intravenosa é indicado na administração de fluidos intravenosos, retirada de amostras de sangue e para administração de fluidos e medicamentos intravenosos no sistema circulatório de pacientes.

INSTRUÇÃO DE USO

- Selecione o tamanho adequado de Cânula I.V;
- Cuidadosamente, selecione e limpe o local da punção venosa;
- Inspeccione a embalagem da cânula para integridade e validade e, em seguida remova a cânula da embalagem;
- Remova a tampa da agulha e segure a projeção do centro da agulha;
- Insira a cânula na veia em um ângulo baixo e verifique se há sangue na câmara retrospectiva [flashback- Flash- Vue®], para garantir a punção venosa adequada;
- Avance o cateter na veia e, simultaneamente, retire a agulha com um movimento rápido e contínuo paralelo à pele;
- É altamente recomendável que o centro da agulha não seja girado (no sentido horário/anti-horário), durante a retirada da agulha;
- Descarte a agulha imediatamente no recipiente de perfuro cortantes;
- Evite o derramamento de sangue, pressionando o dedo na veia, sobre ou acima da ponta do cateter;
- Substitua a agulha com outra Linha de conjunto de infusão I,V. ou o plugue luer lock;
- Cubra o local da punção com um curativo estéril;
- Inspeccione o local da punção de veias regularmente em busca de reações e verifique todas as conexões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cânula:	Aço Inoxidável (SS 304)
Cateter:	Poliuretano
Anel deslizante:	Poliacetato
Hub da Agulha:	Polipropileno
Filtro Porex:	Polietileno de alta densidade (HDPE)
Tampa:	polipropileno

Luer Lock:

Polietileno de alta densidade (HDPE)



* Produto isento de Látex.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO	COMPRIMENTO DO CATETER X DIÂMETRO EXTERNO	COR
8368	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	14G	45mm x 2,0mm	LARANJA
8361	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	16G	45mm x 1,7mm	CINZA
8364	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	18G	45mm x 1,3mm	VERDE
8466	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	20G	32mm x 1,1mm	ROSA
8660	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	22G	25mm x 0,9mm	AZUL
8363	Cateter IV Periférico Jelco Seriva – PUR	24G	19mm x 0,7mm	AMARELO

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Os Cateteres com cânula JELCO SERIVA™ IV – PUR são embalados individualmente em um blister de papel filme de grau médico coberto por PVC (cloreto de polivinila) selada em Tyvek.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente entre 15°C - 30°C, em local seco e livre de umidade.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Leia as instruções antes de usar. O produto deve ser utilizado de acordo com as instruções de uso;
- O produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde qualificados;
- A reutilização e a limpeza do produto podem alterar suas propriedades estruturais e mecânicas;
- Verifique a integridade do produto e da embalagem antes de usar e também a data de validade;
- Não use tesouras ou outros instrumentos de corte no local de inserção ou perto dele, pois o cateter pode ser danificado ou cortado;
- Não puxe ou empurre o cateter com força excessiva e não dobre o cateter, pois o cateter pode ficar danificado ou separado do centro;
- Use o produto imediatamente após abrir a embalagem individual do blister;
- Não tente reinserir uma agulha parcialmente ou completamente retirada;
- Não use se o pacote estiver aberto ou danificado;
- Não reesterilize. Descarte o conjunto após o uso único;

- O produto deve ser substituído e descartado conforme o protocolo aprovado pela instalação ou as diretrizes do CDC;
- É contraindicado administração de fluidos altamente viscosos e grandes transfusões de sangue;
- Não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos materiais utilizados.

Importado e Distribuído por:

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259