



## RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL AMBÚ ADVANTIVE

REGISTRO ANVISA 10296900120

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Selecionar o tamanho adequado para cada paciente.
2. O paciente deverá deitar-se com o rosto para cima.
3. Verificar se as vias aéreas estão desobstruídas.
4. Limpar a garganta e remover qualquer coisa que estiver na boca e garganta do paciente (dentadura por exemplo).
5. Inclinar a cabeça do paciente para trás.
6. Introduzir o tubo orofaríngeo na boca do paciente de modo a evitar que ele possa ferir a própria língua. Apertar a bolsa forçando o ar para os pulmões.
7. O operador deverá posicionar-se atrás da cabeça do paciente, inclinando sua cabeça para trás e segurando de maneira firme para permitir uma boa respiração, bem como puxar o seu queixo para cima.
8. Colocar a máscara cobrindo a boca e o nariz do paciente, fixando-a firmemente utilizando o dedo indicador e polegar.
9. Com a outra mão, comprimir o balão de forma ritmada aplicando uma pressão adequada de modo a facilitar a respiração do paciente.
10. O operador deverá observar obrigatoriamente se o tórax do paciente se expande cada vez que o ar é insuflado e se comprime quando é expirado. Observar a cor do rosto e dos lábios do paciente.
11. Continuar a reanimação até que a vítima respire naturalmente seca.
12. O ressuscitador somente deverá ser operado por pessoas bem treinadas e qualificadas.

### LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

1. Desmontar as peças.
2. Limpar todas as peças individualmente.
3. Embalar todas as peças e esterilizar separadamente.
4. As peças deverão permanecer dentro da câmara durante 15 minutos a 121°C ou 4 minutos a 134°C.
  - Não colocar as peças sem embalagem adequada dentro da câmara.
  - Não encostar as peças nas paredes da câmara.
  - Não colocar peças uma em cima das outras.
  - Não colocar em autoclave a extensor de oxigênio e o reservatório.



## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

A avaliação, decisão e manuseio do produto deveram ser feito exclusivamente por profissional devidamente habilitado.

Se usado de forma incorreta ou tamanho errado poderá causar danos sérios para os pulmões.

Após o uso limpar e guardar em local apropriado fresco e seco, com temperatura ambiente entre 18~30 °C. Temperaturas muito altas ou baixas poderão reduzir a vida útil do produto.

Limpar e inspecionar o dispositivo antes de cada utilização.

Produto deverá ser esterilizado antes do uso para evitar a contaminação cruzada.

Manter afastado o dispositivo de bordas afiadas.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

## **ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

## **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joamed.com.br](http://www.joamed.com.br)

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

