

# Seringa pra Gasometria com Heparina de Lítio:

**Versões com e sem balanceamento de cálcio**

## Descritivo Técnico:

**Registro Anvisa:  
81140320022**



| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verdação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Método de Esterilização |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Seringa para Gasometria com Heparina de Lítio 1 mL ou 2,5 mL. Agulha de aço inoxidável 22G(0,70X32mm). Disponível na versão balanceada com cálcio.                                                                                                                                                                                                       | Possui tampa do tipo Luer Lock (2,5 mL) ou Luer Slip (2,5 mL e 1 mL), apropriadas para vedação completa após a coleta sanguínea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Óxido de Etileno.       |
| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marca                   |
| <b>Êmbolo com Ponto de Quebra:</b> Facilita o transporte após a coleta.<br><b>Heparina de Lítio Pulverizada:</b> Contém 80 U.I (2,5 mL) ou 30 U.I (1 mL)<br><b>Balanceamento com cálcio:</b> 1,35%<br><b>Descartável:</b> Por favor, descarte após o uso.<br><b>Uso Responsável:</b> Não utilize após o vencimento ou se a embalagem estiver danificada. | Tem o objetivo de avaliar os gases presentes no sangue, como o oxigênio, o gás carbônico, pH sanguíneo e o equilíbrio ácido básico.<br>Os principais parâmetros que observamos no exame de gasometria arterial são: pH, SatO2 (saturação de oxigênio), pCO2 (pressão parcial do gás carbônico) e o HCO3 (bicarbonato).<br>Com o balanceamento de cálcio é possível realizar a medição, também, de eletrólitos. Entre eles: sódio, cálcio iônico, potássio e cloro. |                         |

## Instruções de Uso

1. A coleta de amostras de sangue arterial só deve ser realizada por profissional de saúde capacitado.
2. Realize o preparo do paciente de acordo com seu procedimento padrão.
3. Certifique-se de a embalagem não está rasgada ou danificada.
4. Abra a embalagem e retire a seringa.
5. Insira a agulha no local escolhido para a punção.
6. Colete a amostra, preferencialmente, até a marca indicada – nas seringas de 2,5 mL o volume mínimo é de 1 mL.
7. Homogeneizar por 20-30 segundos, retirar bolhas e tampar.
8. Utilizar ou armazenar a amostra imediatamente.
9. **Atenção:** Produto estéril, de uso único. Não reutilizar!

| Origem    | NCM        | Armazenamento                                     |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| Importado | 9018.31.19 | Temperatura ambiente; Umidade Relativa: 20% a 80% |

  

| Código    | Descritivo                                                                                                               | Embalagem                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| SG25SA-1  | SG25SA-1 Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica 2,5ml Caixa C/100 Un. Luer Lock                                        | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |
| SG25CA-1  | SG25CA-1 Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica 2,5ml C/ Agulha 22g Caixa C/100 Un. Luer Lock                          | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |
| SG25SA-LS | SG25SA-LS - Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica 2,5ml Caixa C/100 Un. Luer Slip                                     | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |
| SG25CA-LS | SG25CA-LS - Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica 2,5ml Caixa C/100 Un. Luer Slip - Com Agulha 22g                    | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |
| SG10CA-LS | SG10CA-LS Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica 1,0 ML C/ Agulha 22g Caixa C/100 Un. Luer Slip                        | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |
| SG25CA-CA | SG25CA-CA Seringa P/ Gasometria C/ Heparina Litica - Balanceada Com Calcio 2,5ml C/ Agulha 22g Caixa C/100 Un. Luer Lock | 1pcs/blister, 100 unidades/caixa |