

Cadastro / Registro M.S.:

10369469020

Modelos cadastrados:

Máscara Cirurgica

Indicação de Uso:

As máscaras têm como finalidade evitar o contato da respiração do profissional de saúde no paciente durante os procedimentos, prevenindo desta forma uma possível contaminação.

Instrução de uso:

- Ajustar a máscara sobre o nariz através de seu corpo.
- Passar as duas alças elásticas atrás da orelha.
- Verificar se a máscara está firmemente colocada.
- Realizar o procedimento.
- Após o uso descartar em local para materiais potencialmente contaminados.

Conservação, Armazenamento e Transporte:**Armazenamento:**

- Em temperatura entre 4°C - 50°C e em umidade relativa de 10 - 80% evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Transporte:

- Em temperatura entre 4°C - 50°C e em umidade relativa de 10 - 80% evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Manipulação:

- Em temperatura entre 4°C - 50°C e em umidade relativa de 10 - 90% evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade.

Advertência/Precaução:**Advertencias:**

- É recomendado o uso único. Descartar após o uso de acordo com a legislação vigente.

Precaução:

- Verificar a integridade do produto, em caso de dúvida não utilizar o mesmo.

Validade:

5 Anos

Contraindicação:

Não se aplica

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40**SAC:** 0800 6658007**Resp. Técnica:** Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067**Fabricante:** Xiantao Xingrong Protective Products Co. Ltd.

N. 46, Peng Chang Ave – Xiantao - Hubei – China.