

## **AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TNT SMS 40G (RTI)**

### **REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

### **PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**

### **DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL AZUL SMS PP40

Matéria Prima: AVENTAL: 100 % POLIPROPILENO

TOALHA: 100 % VISCOSE

Produto Estéril: (X ) Sim ( ) Não

Validade: 2 Anos

### **FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

### **DESCRIÇÃO**

Avental veterinário de aplicação em cirurgias com itens fabricados 100% polipropileno SMS em PP40 pronto para o uso. Produto sempre embalado em envelope com papel grau cirúrgico, garantindo a validade de 2 anos da esterilização por ETO.

### **INDICAÇÃO DE USO**

Indicado o uso em procedimentos cirúrgicos ou que necessitem da proteção do profissional, com o intuito de evitar contaminações.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- Abrir a embalagem em papel grau cirúrgico.
- Abrir a embalagem em wrap confeccionado em não tecido SMS.
- Coloque a mão direita na dobra em direção a manga do avental e levante-o.
- Com a mão esquerda dentro do avental, comece a abri-lo.
- Ajuste o avental nas mangas e ombros.
- Ajuste as mangas e ombros do avental. Amarrar as tiras internas do avental.
- Segure o TAG com a mão direita e remover uma tira com a esquerda.
- Entregue o TAG ao assistente, que o devolverá após o transpasse pelas costas. Puxe a tira longa do cartão que o assistente segura e amarre as tiras, garantindo o fechamento.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
035.00.0540	AVENTAL CIR. EST. SMS AZUL 40G + TOALHA (01) VETERINÁRIO (G) PCT1UN (RTI)

**FOTO**

AVENTAL CIR. EST. SMS AZUL 40G + TOALHA (01)  
VETERINÁRIO (G) PCT1UN (RTI) – COD: 035.00.0540

**\*ISENTO DE LÁTEX**

**COMPOSIÇÃO**

- AVENTAL: 100% Polipropileno
- TOALHA: 100% Viscose
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

**ARMAZENAGEM**

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

Embalagem de papel grau cirúrgico contendo 1 unidade.

**DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051