

INSTRUÇÕES DE USO

AGESANI – SOLUÇÃO DE PHMB

*Modelo: PHMB010; PHMB020; PHMB030; PHMB40; PHMB050; PHMB060; PHMB100;
PHMB200; PHMB240; PHMB250; PHMB300; PHMB340; PHMB350; PHMB500;
PHMB1000;*



NOME TÉCNICO: Curativo

NOME COMERCIAL: Agesani Solução de PHMB

ANEXO III.B – INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO DE USO:

O produto é uma solução aquosa de Polihexamida (PHMB), utilizada para limpeza e hidratação de feridas agudas ou crônicas. Indicado na limpeza de biofilmes.

TABELA COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS

MODELO	CONTEÚDO	COMPOSIÇÃO
PHMB010	10mL	Polihexametileno Biguanida (PHMB) – 0,1% Composto Betaínico – 0,1% Água Purificada – 99,8%
PHMB020	20mL	
PHMB030	30mL	
PHMB40	40mL	
PHMB050	50mL	
PHMB060	60mL	
PHMB100	100mL	
PHMB200	200mL	
PHMB240	240mL	
PHMB250	250mL	
PHMB300	300mL	
PHMB340	340mL	
PHMB350	350mL	
PHMB500	500mL	
PHMB1000	1000mL	

ANEXO III.B – INSTRUÇÕES DE USO

ASPECTO E ODOR: Solução límpida, incolor e inodoro

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O produto é comercializado não estéril acondicionado em um frasco de polietileno com tampa injetada em polipropileno com bico aplicador.



Apresentações:

- Frasco contendo 10ml, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, 100ml, 200ml, 240ml, 250ml, 300ml, 340ml, 350ml, 500ml, 1000ml; Caixa com 1 unidade

Cada embalagem contém:

01 Agesani Solução de PHMB

01 Instrução de Uso

Embalagem Primária	Embalagem Secundária
	

MODO DE USO

PREPARO PARA APLICAÇÃO:

É necessária uma limpeza da área periférica com Agesani Solução de PHMB para minimizar o risco de disseminação de microrganismos.

ANEXO III.B – INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Aplique o produto diretamente na ferida. No caso de feridas com tecido cicatricial espesso, deixar agir por 15 minutos. Não é necessário enxaguar depois. Os curativos adesivos e as crostas podem ser eliminados através da umidificação com Agesani Solução de PHMB.

Não é necessário enxaguar.

A aplicação deve ser frequente, até que todo esfacelo possa ser removido com facilidade, e a ferida esteja aparentemente limpa.

Troca e remoção do produto

O produto é colocado sobre a ferida por 15 minutos na hora da troca para hidratação e é retirado para colocar outro curativo novo.

Tempo de uso

A aplicação deve ser por tempo indeterminado, até que todo esfacelo e o biofilme possam ser removido com facilidade, e a ferida esteja aparentemente e deverá ser feita sob orientação de um profissional da saúde.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- Produto para uso externo, não deve ser ingerido. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.
- Não utilizar este produto caso o paciente apresente sensibilidade a um de seus componentes.
- Lavar as mãos antes e após o procedimento.
- O tratamento de feridas com o produto deve ser monitorado por um profissional da saúde, para que o produto seja corretamente aplicado e para que seja indicada a frequência adequada das trocas de curativo.
- Só para utilização externa em feridas cutâneas.
- Não serve para perfusão ou injeção.
- Utilizar exclusivamente produtos íntegros e não danificados.
- Não expor os frascos à luz solar direta.
- Em caso de ocorrência de potencial reação de hipersensibilidade (prurido generalizado, eritema com ou sem urticária) é recomendado a interrupção de uso do produto e procurar o médico para uma avaliação.

ANEXO III.B – INSTRUÇÕES DE USO

CONTRA-INDICAÇÕES

- Uma vez que não pode ser excluída a possibilidade de alergia, não aplicar Agesani Solução de PHMB em caso de alergias conhecidas, ou de suspeita de alergia, a qualquer um dos seus componentes.
- Não utilizar em cartilagem hialina.
- Não utilizar o produto em associação com tensoativos aniônicos. Não misturar o Agesani Solução de PHMB com outros produtos de limpeza de feridas, como: sabonetes, pomadas, óleos ou enzimas, entre outros.

REAÇÕES ADVERSAS

No caso de hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula, interrompa o uso e procure orientação profissional.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O produto deverá ser armazenado e transportado dentro da embalagem original em condições normais de temperatura ambiente entre 30°C a 35°C.

PRAZO DE VALIDADE

03 anos

PRAZO DE VALIDADE APÓS ABERTO

30 dias

DESCARTE

O produto deve ser descartado conforme os procedimentos de manuseio determinado pelo estabelecimento de saúde.

ATENÇÃO:

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

ANEXO III.B – INSTRUÇÕES DE USO

FABRICANTE:

Age Hospitalar Ltda

CNPJ: 13.038.445/0001-02

Endereço: Rua das Carmelitas, 702 – Hauer – Curitiba - Paraná

Autorização de Funcionamento: 81.610-070

Fone: (41) 3501 8974

Responsável Técnico: Rodrigo Kasubowski Xavier CRQ/PR - 09200850

Reg. ANVISA n°:

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide embalagem

Declaramos que todas as informações contidas neste Modelo de **Instruções** são verdadeiras.

Rodrigo Kasubowski Xavier
CRQ/PR - 09200850
Responsável Técnico e Legal