

## **CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA (RTI)**

### **REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro no MAPA de acordo com o art.44 do regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004, IN Nº 37 de 08/09/1999.

### **PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**

### **DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: PLUG ADAPTADOR COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE  
Matéria Prima: Plug em policarbonato e membrana em borracha sintética  
Produto Estéril: (X) Sim ( ) Não  
Método de Esterilização: Óxido de Etileno  
Validade: 5 Anos

### **FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

### **DESCRIÇÃO**

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo anexado a conjuntos de infusão / transfusão para adicionar medicamentos, realizar salinizações, e após o uso mantém barreira de fechamento evitando contato com o meio externo.

### **INDICAÇÃO DE USO**

O Plug Adaptador com Membrana Autocicatrizante é um dispositivo indicado para o uso em conjuntos de infusão/ transfusão e cateteres intravenosos periféricos e centrais que se destinam à manutenção da permeabilidade da infusão intravenosa.

## INSTRUÇÃO DE USO

- Abra a embalagem de forma asséptica.
- Certifique-se de que a tampa não toque a superfície externa da embalagem.
- Realize antissepsia na ponta do dispositivo a ser utilizado e conecte o adaptador. Quando conectar gire cerca de 2-3 vezes até que a conexão esteja firme o suficiente.
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

Nota: Realizar antissepsia na ponta do dispositivo antes e depois do uso.

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PRNRTI	CONECTOR (PRN) LUER COM MEMBRANA CX100UN (RTI)

## FOTO



### Tampa Luer com Membrana

Dispositivo auxiliar para realizar a vedação de acessos bicos slip e/ou lock, evitando contaminações do meio externo no acesso de punção venosa periférica, **MANTENDO O SISTEMA FECHADO.**

LIVRE DE LÁTEX

ESTÉRIL



CAIXA COM  
**100**  
UNIDADES

**\*ISENTO DE LÁTEX**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: 18.35 mm
- Diâmetro: 9.83mm
- Conexão: Luer

**COMPOSIÇÃO**

- Plug: Policarbonato
- Membrana: Borracha sintética
- Atóxico
- Não Inflamável
- Uso único

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- O fabricante recomenda o uso único;
- Estéril a óxido de etileno;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Não utilizar após a data de validade;
- Esterilidade garantida, desde que a embalagem não esteja aberta ou danificada;
- Atóxico e apirogênico;
- Descarte o dispositivo de acordo com protocolo da instituição.

**ARMAZENAGEM**

Armazenar em local limpo, seco, livre de luz solar e vapores químicos. Proibido reprocessar.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

O Plug Adaptador com membrana autocicatrizante é fornecido embalada unitariamente em blister de PET e tyvek/PGC, posteriormente em caixas de papel com 100 peças.

**DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051