

Frasco Coletor (Serobronco) - **Registro Anvisa: 81479110021**



- Descrição, indicação e características:

Frasco coletor de PVC cristal, rígido, atóxico e com tampa. Frascos e extensões disponíveis em diferentes volumes e comprimentos. Com graduação 5 em 5 ml ou 10 em 10ml, inodoro, com alça para transporte, dispositivo de fixação, acompanha etiqueta adesiva para identificação do paciente e do procedimento. Adaptador em polietileno fixado na tampa, lacre de segurança, selo d'água rígido e tampa de rosca com duas vias.

Eficaz para coleta asséptica de secreção traqueal e lavado broncoalveolar por meio de aspiração direta ou broncoscopia.

- Composição do produto:

- Extensão em PVC siliconizado atóxico (uso hospitalar);
- Frasco em PVC cristal atóxico (uso hospitalar);
- Tampa em PP (Polipropileno) azul atóxico (uso hospitalar);
- Etiqueta para registro de paciente ou procedimento;
- Isento de látex;
- Embalagem individual;
- Esterilizado em oxido de etileno.

- Modo de uso:

- Verifique se o modelo do produto a ser utilizado realmente se aplica a finalidade desejada;

-
- Verifique a integridade da embalagem do produto e o prazo de validade;
 - Abra a embalagem cuidadosamente utilizando técnica asséptica de forma a não anular sua esterilização;
 - Conecte o tubo de PVC do frasco coletor ao broncoscópio ou a sonda de aspiração;
 - Conecte o tubo de sucção ao adaptador macho fixado na lateral da tampa do frasco coletor;
 - Proceda com a aspiração asséptica;
 - Ao final da aspiração, remova o adaptador macho da tampa do frasco coletor com o tubo de sucção ainda encaixado;
 - Desconecte o tubo de PVC do broncoscópio ou de sonda de aspiração e ajuste-o na abertura do prolongador fixo na lateral da tampa do frasco coletor;
 - Descarte após o uso.

- Precauções e advertências:

- Em caso de vazamento, interromper o procedimento imediatamente;
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido;
- Os produtos SEROBRONCO foram concebidos para **uso único** e exclusivo a somente um paciente;
- Não reutilizar;
- Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade.

A Seroplast **não se responsabiliza** por danos causados por utilização não conforme com o manual de uso.

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou elogios entrar em contato em um dos meios citados ao final do documento.

Fabricado por:

SeroPlast Indústria e Comércio Hospitalar Eireli

CNPJ: 23.596.733/0001-36

IE.: 87.219.267



Resp. Técnico: Eduardo Santos do Canto
CRF/RJ 8207