

Dreno de Sucção (Serovac) - Registro Anvisa: 81479110029



- Descrição, indicação e características:

Tubo flexível radiopaco de PVC atóxico e agulha em aço inox (grau médico), disponível em diferentes volumes e comprimentos. Eficaz e prático para drenagem de sucção em procedimentos cirúrgicos e pós cirúrgicos. É um sistema fechado que utiliza uma leve sucção (vácuo) para drenar a secreção e reservá-lo temporariamente em compartimento.

- Composição do produto:

- PVC siliconizado atóxico (uso hospitalar);
- Clamp para interrupção do fluxo e regulação do vácuo;
- Reservatório em PE (polietileno) atóxico (uso hospitalar) 300ml / 500ml / 600ml / 700ml;
- Agulha aço inox (grau médico) nos tamanhos 32mm / 48mm / 64mm;
- Tubo flexível de 1.200mm a 3.000mm;
- Embalagem em papel grau cirúrgico;
- Conector em 2 vias ou 3 vias;
- Agulha em aço inox 316 (uso hospitalar);
- Alça em PVC;
- Isento de látex;
- Embalagem individual;
- Esterilizado em oxido de etileno.

- Modo de uso:

- Verifique se o modelo do produto a ser utilizado realmente se aplica a finalidade desejada;
- Verifique a integridade da embalagem do produto e o prazo de validade;
- Abra a embalagem cuidadosamente utilizando técnica asséptica de forma a não anular sua esterilização;
- Feche o clamp do sistema antes de introduzi-lo;
- Após o correto posicionamento, conecte-o ao sistema de sucção;
- Abra o clamp;
- Certifique-se de manter o local de inserção protegido adequadamente afim de evitar o risco de contaminação;
- Radiografe se necessário, para verificar se o posicionamento está correto;
- Descarte após o uso.

- Precauções e advertências;

- Em caso de vazamento, interromper o procedimento imediatamente;
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido;
- Os produtos SEROVAC foram concebidos para **uso único** e exclusivo a somente um paciente;
- Não reutilizar;
- Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade.

A Seroplast **não se responsabiliza** por danos causados por utilização não conforme com o manual de uso.

Em caso de dúvidas, sugestões e/ou elogios entrar em contato em um dos meios citados ao final do documento.

Fabricado por:

SeroPlast Indústria e Comércio Hospitalar Eireli

CNPJ: 23.596.733/0001-36

IE.: 87.219.267

Resp. Técnico: ALEXANDRE WAGNER BARATA
FARMACEUTICO CRF RJ 27520