

## **GARRA ECG UNIVERSAL VETERINÁRIO (RTI)**

### **REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

### **PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**

### **DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: GARRA ECG UNIVERSAL REUTILIZÁVEL VETERINÁRIO

Matéria Prima: Ponta: Metal

Corpo: Plástico

Produto Estéril: ( ) Sim (X) Não

Validade: INDETERMINADA

### **DESCRIÇÃO**

As Garras para ECG veterinário da Royal Tech Import são confeccionadas com componentes de alta qualidade para proporcionar um exame de eletrocardiograma com maior precisão. O conjunto modelo Jacaré possui em sua composição 5 peças iguais. Caracterizado como universal, possui a capacidade de conexão com diferentes tipos de terminações dos cabos de ECG.

### **INDICAÇÃO DE USO**

As Garras tipo Jacaré são utilizadas como plug adaptador do cabo de ECG veterinário. Produto reutilizável e universal, possuindo 3 diferentes tipos de conexão. Adapta-se aos terminais: Pino clip 4.0mm, Pino Banana 4.0mm e Pino Din 3.0mm.


**INSTRUÇÕES DE USO**

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica.
- Produto reutilizável.
- Modelo universal, possui 3 diferentes tipos de conexão: Pino clip 4.0mm, Pino Banana 4.0mm e Pino Din 3.0mm.
- As Garras devem ser limpas antes de cada uso.
- Necessário o preparo da pele do paciente antes da utilização das garras.
- O uso do gel condutor na pele do paciente e na garra, fornece uma leitura adequada do ECG.
- Use somente água destilada ou desmineralizada para limpeza.
- Após o uso iniciar a limpeza o quanto antes.
- Para limpeza mergulhe os instrumentais em água com solução apropriada para limpeza de instrumentos médicos na temperatura de 40° a 45° durante 10 a 20 minutos, em seguida escove os instrumentais com detergente ou sabão neutro.
- Enxaguar para remoção de espuma e resíduos.
- Após a limpeza seque completamente todos os itens.
- Manter em local seco e limpo, ao abrigo da luz solar e umidade.

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
GECGRTI	GARRA ECG UNIVERSAL (VETERINÁRIO) 5UN (RTI)

**FOTO**

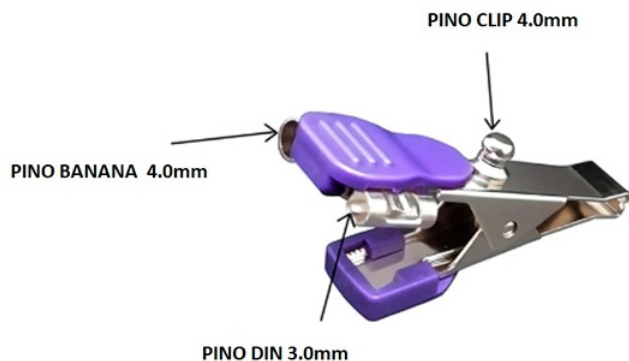

**COMPOSIÇÃO**

- Plástico e metal.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados.
- Não autoclavável.
- Após a higienização não deixar secando naturalmente, necessário secar todas as peças com uma toalha macia.
- Não utilizar lã de aço para remover impurezas.
- Fazer a desinfecção utilizando produtos adequados de preferência sem FENOL.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

**FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM**

Embalagem primária: Saco plástico.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

**GARANTIA**

- Garantia de 3 meses após o recebimento da mercadoria pelo cliente.
- (referente à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:****ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: [www.royaltechimport.com.br](http://www.royaltechimport.com.br)

E-mail: [royaltech.vet.import@gmail.com](mailto:royaltech.vet.import@gmail.com)

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

**FABRICANTE:**

Produto fabricado na China.