

INSTRUÇÃO DE USO - CATETER INTRAVENOSO TKL

Nº REGISTRO 80288090079

NOME TÉCNICO Cateteres

INDICAÇÃO DE USO O Cateter Intravenoso TKL é um dispositivo pelo qual podem ser introduzidos ou retirados fluidos do sistema circulatório humano, indicado para infusão de soluções intravenosas, administração intermitente de drogas endovenosas e manutenção da hidratação e/ou desidratação corretas se o paciente for incapaz de manter volume de líquido suficiente por via oral.
São dispositivos de contato com o paciente que controlam ou interagem com outros dispositivos como seringas, equipos, etc.

MECANISMO DE AÇÃO O Cateter Intravenoso TKL é introduzido no vaso sanguíneo sobre uma agulha oca introdutora, permanecendo dentro do vaso sanguíneo por um curto período de tempo. Todo o dispositivo entra em contato externamente com a pele, apenas o tubo do cateter tem contato invasivo.
O Cateter Intravenoso TKL é composto por um tubo plástico flexível curto que apresenta listras compostas de sulfato de bário (substância radiopaca impermeável aos raios X ou a outras formas de energia radiante) misturadas ao polímero.

INSTRUÇÃO DE USO

- 1) Selecione cuidadosamente a veia periférica do paciente a ser puncionada, amarre o garrote e execute a assepsia do local;
- 2) Abra o blister e retire o cateter da embalagem estéril individual;
- 3) Remova a tampa protetora da agulha segurando no canhão da agulha (não toque no cateter);
- 4) Segure o cateter pelo canhão da agulha e mantenha o bisel da agulha para cima. Puncione a agulha na veia do paciente a um ângulo de 40°, assim que o sangue preencher a câmara flashback, ajuste o ângulo para 10° e introduza continuamente a agulha para dentro da veia cerca de 1cm;
- 5) Solte o garrote, pressione a veia com o dedo da mão esquerda para interromper o fluxo de sangue e segure com a mão direita o cateter;
- 6) Empurre o cateter lentamente na veia com a mão direita, puxe delicadamente o canhão da agulha no sentido contrário da punção;
- 7) Descarte a agulha de acordo com a prática geral da instituição;
- 8) Fixe as asas do cateter na pele do paciente quando presente. Caso o modelo de cateter usado não possua asas prenda-o de forma adequada à pele do paciente;
- 9) Conecte o cateter ao equipo;
- 10) Execute a rotina de controle e manutenção da punção conforme normas médicas.

Obs.: A tampa do injetor deve permanecer fechada quando não estiver sendo usado. Para a administração de medicamentos remova a tampa do injetor e realize a injeção do medicamento, em seguida tampe novamente o injetor (somente para modelos que possuam injetor).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos após a data de esterilização. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926
Filial: Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil
www.tklbrasil.com.br | comercial@tklbrasil.com.br | @tkl_brasil
Responsável Técnica: Camila A. de M. Buzzatto | CRBM-6 1245